

機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 70682000
カートリッジディスペンサーN

【形状・構造及び原理等】

材質：プラスチック

【使用目的又は効果】

本品は、歯科材料（印象材料など）を練和又は混和する器具である。

【使用方法等】

1. カートリッジディスペンサーN 背面の黒いリリース・レバーを上げて、黒いプランジャーを引けるところまで完全に引いてください。
2. カートリッジディスペンサーN 上部のカートリッジ・ロックを上げて、カートリッジのロックを解除してください。
3. V字の切り込みを下にして、カートリッジをカートリッジディスペンサーN に差し込んでください。
4. カートリッジ・ロックを元に戻して、カートリッジをロックしてください。
5. カートリッジ・キャップを時計周りに90度回転させて外してください。
6. ミキシングチップN(別売)を装着する前に、ベース及びキャタリストを弱めの圧力で少量出して、カートリッジから均等に出るか確認してください。硬化物がある場合、インストルメントを使用して硬化物を取り除いてください。確認後、ベース及びキャタリストの余剰分を拭きとってください。
7. ミキシングチップN の色のついた辺縁にあるV字切込みと、カートリッジの辺縁のV字の切込みが直線状に並ぶように、ミキシングチップN をカートリッジに挿入してください。スムーズに取り付けられない場合は、ミキシングチップN 内面の2つの穴とチップの辺縁のV字型の突起が直線状に並んでいるか確認してください。
8. ミキシングチップN がカートリッジに取り付けられたら、時計周りに90度回転させて、ミキシングチップN をロックしてください。
9. カートリッジディスペンサーN を使用する際には、適切かつ均一な力でトリガーを握って材料を出してください。トリガーに力を加えるのをやめると、材料は出なくなります。
10. 材料によって、直接口腔内に注入する場合、ミキシングチップN から直接口腔内へ材料を注入することができます。その際、インターオーラルチップをミキシングチップN の先に取り付けると便利です。あるいは、別の口腔内用シリンジにカートリッジディスペンサーN から材料を注入して、口腔内に注入することもできます。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

1. カートリッジ保管時には、カートリッジ キャップを再度カートリッジに装着すること。あるいは、使用済のミキシングチップN (別売)をそのまま次の使用時まで装着して、キャップとして使用すること。
2. カートリッジを交換する場合は、カートリッジ背面のリリース・レバーを上げて、プランジャーを引けるところまで完全に引き、空のカートリッジを破棄すること。

【使用上の注意】**【重要な基本的注意】**

1. 開封直後及び汚染の際（体液の飛散及び付着、あるいは汚染された手や口腔内組織への接触などの場合）は、熱湯と石鹸あるいは合成洗剤を使用して、擦りながら洗うこと。
2. 病院レベルの消毒とされる核菌殺菌性の消毒薬で消毒すること。フェノールやヨード系の消毒薬は表面にステインが生じる可能性があるためご注意ください。アルコールなど有機溶媒を含む液体を使用すると、プラスチック部分を溶解する可能性があるため、水性の消毒薬を使用すること。消毒薬の取扱説明書に従って消毒すること。

【保管方法及び有効期間等】**【保管方法】**

本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	デンツプライシロナ株式会社
製造国	スイス
製造業者	ズルツァー ミックスパック社 Sulzer Mixpac AG

【問い合わせ窓口】

カスタマーサービス
電話番号 0120-789-123