

2018 年 10 月 19 日（新様式第 1 版）

届出番号：13B1X10271000017

歯 0 9 歯科用研削材及び研磨材
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000
チタンブラシ（TN brush）

再使用禁止

【警告】

1. 本品は単回使用非滅菌医療機器である。使用前に必ず滅菌すること。
2. 再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 BMS JAPAN
〒110-0005 東京都台東区上野一丁目 4 番 8 号
TEL：03（5817）8189

【形状・構造及び原理等】

概要

本品は、インプラント及び上部構造の周囲を清掃するために用いる器材である。太さにより 2 種類ある。

製造業者：Dentium Co., Ltd

国 名：大韓民国

品番	ブラシ直径, mm	ブラシ長さ(L), mm
TN-0.8	0.8	2.0
TN-1.0	1.0	2.0

【使用目的又は効果】

〔使用目的〕

本品は、インプラント及び上部構造の周囲を清掃するために用いる器材である。

【使用方法等】

- ・包装を開封して本品を取り出し、高圧蒸気滅菌（オートクレーブ）を行う。推奨滅菌条件：121℃、15 分。
- ・ブラシをハンドピースに装着する。回転させ異常がないことを確認する。
- ・500～800rpm にて注水下で施術部位にて清掃を行う。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・本品の使用に際しては、歯科技術に熟練し、かつ製品特性や手術手技を十分に理解した歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・本品は未滅菌製品であり、使用に際しては必ず高圧蒸気滅菌（オートクレーブ）を行うこと。
推奨滅菌条件：
121℃、15 分
- ・本品は、記載の使用目的以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保護管理すること。

【包装】

1 本/袋、2 本/袋、5 本/袋、10 本/袋