

類別 器具器械 (36) 医療用ピンセット

一般的名称 ピンセット 35079001

販売名 上山式深部用ピンセット

【禁忌禁止事項】

製品は【使用目的】に記載した目的以外に使用しないこと。
また、購入後の本製品への二次的加工は行わないこと。

【構成】 高硬度クロムニッケル合金

【形状・構造等】

村中医療器(株) 上山式深部用ピンセットカタログに準ずる。

品番	品 名	規格
K-801	上山式深部用ピンセット 直	全長 180mm 有効長 70mm
K-802	上山式深部用ピンセット 45°	全長 180mm 有効長 70mm
K-806	上山式深部用ピンセット 直	全長 200mm 有効長 90mm
K-807	上山式深部用ピンセット	全長 200mm 有効長 90mm
K-8220	上山式深部用ピンセット 45° 先端 1.5mm	全長 180mm 有効長 70mm
K-8270	上山式深部用ピンセット 45° 先端 1.5mm	全長 200mm 有効長 90mm

【使用目的】 本品は、外科手術器具です

【使用上の注意】

- 1, 使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
- 2, 使用目的以外の目的で使用しないこと。
- 3, 使用後、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄し除去すること。
- 4, 塩素系及びヨウ素系の消毒剤等、金属腐食の原因となる成

分を含む薬剤の使用をなるべく避け、使用中に付着した場合は水洗いすること。

- 5, 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電・火傷する危険があり、また器具表面を損傷するので併用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1, 洗浄・乾燥後から使用するまでの保管中、良好な乾燥状態を保てる場所で保管すること。
- 2, 滅菌後に既滅菌状態で保管する場合、再汚染を防ぐ清潔で、かつ良好な乾燥状態が保てる場所に保管し、滅菌有効期限を管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1, 使用後、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄除去し、消毒すること。
- 2, 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取り扱い方法を守り使用すること。
- 3, 超音波洗浄装置は刃先部を鈍化する恐れがあることから、洗浄に用いないこと。ウォッシャーディスインフェクタ等の洗浄装置で洗浄する場合、固定具等で器具を固定し、汚れが落ちやすい状態でバスケット等に収納処理すること。
- 4, 仕上げすぎには、純水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨する。洗浄後、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
- 5, 滅菌前、使用前に汚れ・破損・可動部の動き等を点検すること。
- 6, 点検後、滅菌のための適切な包装を行い、高圧蒸気滅菌もしくはEOG ガス滅菌を行うこと。その際、確実な滅菌ができる様に配慮すること。
- 7, 強アルカリ性や強酸性の洗剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあり、その使用を避けること。金属タワシ、クレンザー（磨き粉）等は器具表面を損傷するので使用を避けること。

【包装】 1 本／箱

【製造販売業者の名称及び住所等】

株式会社 高山医療機械製作所

本社 東京都台東区谷中 3-4-4

TEL 03-3821-0249 FAX 03-3821-0344

【販売元の名称及び住所】

村中医療器株式会社 総合センター

本社 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号

TEL 0725-53-5541 FAX 0725-53-5641