

類別器具機械 医療用剥離子 42

一般的名称 へら 13645000

販売名 プラム片メス型剥離ペラ（岩崎・上山式）

【禁忌禁止事項】

製品は【使用目的】に記載した目的以外に使用しないこと。
また、購入後の本製品への二次的加工は行わないこと。

【形状・構造等】村中医療器(株)『ムラナカ総合カタログ』に準ずる。

| 品番 | 規 格 | |
|---------|-------|---------|
| IK-340 | L 4mm | D 3mm |
| IK-230 | L 3mm | D 2mm |
| IK-120 | L 2mm | D 1mm |
| IK-1520 | L 2mm | D 1.5mm |

【組成】ステンレス鋼

【使用目的】本品は、外科手術器具です。

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
2. 使用目的以外の目的で使用しないこと。
3. 使用后、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄し除去すること。
4. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤等、金属腐食の原因となる成分を含む薬剤の使用をなるべく避け、使用中に付着した場合は水洗いすること。
5. 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電・火傷する危険があり、また器具表面を損傷するので併用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 洗浄・乾燥後から使用するまでの保管中、良好な乾燥状態を保てる場所で保管すること。
2. 滅菌後に既滅菌状態で保管する場合、再汚染を防ぐ清潔で、かつ良好な乾燥状態を保てる場所に保管し、滅菌有効期限を理すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用后、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄除去し、消毒すること。

2. 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取り扱い方法を守り使用すること。
3. 超音波洗浄装置は刃先部を鈍化する恐れがあることから、洗浄に用いないこと。ウォッシャーディスインフェクタ等の洗浄装置で洗浄する場合、固定具等で器具を固定し、汚れが落ちやすい状態でバスケット等に収納処理すること。
4. 仕上げすぎには、純水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨する。洗浄後、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
5. 滅菌前、使用前に汚れ・破損・可動部の動き等を点検すること。
6. 点検後、滅菌のための適切な包装を行い、高圧蒸気滅菌もしくはEOGガス滅菌を行うこと。その際、確実な滅菌ができる様に配慮すること。
7. 強アルカリ性や強酸性の洗剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあり、その使用を避けること。金属タワシ、クレンザー(磨き粉)等は器具表面を損傷するので使用を避けること。

【包装】1本/箱

【製造販売業者の名称及び住所等】

株式会社 高山医療機械製作所
本社 東京都台東区谷中 3-4-4
TEL 03-3821-0249 FAX 03-3821-0344

【販売元の名称及び住所】

村中医療器株式会社 総合センター本社
大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2
TEL 0725-53-5541 FAX 0725-53-5641