

類別器具機械 医療用はさみ 35 一般的名称 はさみ 35325001

販売名 上山式マイクロ剪刀

**【禁忌禁止事項】**

製品は【使用目的】に記載した目的以外に使用しないこと。  
また、購入後の本製品への二次的加工は行わないこと。

【構成】 マルテンサイトステンレス鋼

【形状・構造等】

品番	品名
K-101-1	上山式マイクロ剪刀 パヨネット 195mm 右手用
K-101-2	上山式マイクロ剪刀 パヨネット 195mm 左手用
K-102-1	上山式マイクロ剪刀 パヨネット 160mm 右手用
K-102-2	上山式マイクロ剪刀 パヨネット 160mm 左手用
K-103	上山式マイクロ剪刀 ストレート 160mm 側弯
K-103-18	上山式マイクロ剪刀 ストレート 180mm 側弯
K-1030	上山式マイクロ剪刀 全長 160mm 側弯ストレート ムラマサ SP
K-1030-18	上山式マイクロ剪刀 全長 180mm 側弯ストレート ムラマサ SP
K-104	上山式マイクロ剪刀 全長 120mm 側弯ストレート
K-203	上山式マイクロ剪刀 上山・谷川モデル 全長 160mm ストレート
K-203-18	上山式マイクロ剪刀 上山・谷川モデル 全長 180mm ストレート
K-110-1	上山式マイクロ剪刀 右手首曲 全長 195mm 有効長 100mm パヨネット

K-110-2	上山式マイクロ剪刀 左手首曲 全長 195mm 有効長 100mm パヨネット
K-111-1	上山式マイクロ剪刀 右手強弯 全長 195mm 有効長 100mm パヨネット
K-111-2	上山式マイクロ剪刀 左手強弯 全長 195mm 有効長 100mm パヨネット
K-3010	上山式マイクロ剪刀 パヨネットタイプ 200mm 剛剪 ギザ刃
K-3030	上山式マイクロ剪刀 ストレートタイプ 160mm 剛剪 ギザ刃
K-3030-18	上山式マイクロ剪刀 ストレートタイプ 180mm 剛剪 ギザ刃
K-2010	上山式マイクロ剪刀 パヨネットタイプ 200mm ギザ刃 ミニ 先端鋭
K-2030	上山式マイクロ剪刀 ストレートタイプ 160mm ギザ刃 ミニ 先端鋭
K-2030-18	上山式マイクロ剪刀 ストレートタイプ 180mm ギザ刃 ミニ 先端鋭
特注	病院の症例及び部位に対応したもの

**【使用目的】**

本品は、外科手術器具です。

**【使用上の注意】**

- 1, 使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
- 2, 使用目的以外の目的で使用しないこと。
- 3, 使用后、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄し除去すること。
- 4, 塩素系及びヨウ素系の消毒剤等、金属腐食の原因となる成分を含む薬剤の使用をなるべく避け、使用中に付着した場合は水洗いすること。
- 5, 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電・火傷する危険

があり、また器具表面を損傷するので併用しないこと。

#### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1, 洗浄・乾燥後から使用するまでの保管中、良好な乾燥状態を保てる場所で保管すること。
- 2, 滅菌後に既滅菌状態で保管する場合、再汚染を防ぐ清潔で、かつ良好な乾燥状態が保てる場所に保管し、滅菌有効期限を管理すること。
- 3, 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取り扱い方法を守り使用すること。
- 4, 超音波洗浄装置は刃先部を鈍化する恐れがあることから、洗浄に用いないこと。ウォッシャー・ディスインフェクタ等の洗浄装置で洗浄する場合、固定具等で器具を固定し、汚れが落ちやすい状態でバスケット等に収納処理すること。
- 5, 仕上げすぎには、純水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨する。洗浄後、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
- 6, 滅菌前、使用前に汚れ・破損・可動部の動き等を点検すること。
- 7, 点検後、滅菌のための適切な包装を行い、高圧蒸気滅菌もしくはEOGガス滅菌を行うこと。その際、確実な滅菌ができる様に配慮すること。
- 8, 強アルカリ性や強酸性の洗剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあり、その使用を避けること。金属タワシ、クレンザー（磨き粉）等は器具表面を損傷するので使用を避けること。
- 9, 洗浄後は、かじりの原因となるため、できるだけ稼働部を動かさないこと。
- 10, 本品が熱を持っている場合、必ず常温に戻した後、稼働部を動かすこと。

#### 【保守・点検に係る事項】

- 1, 使用后、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄除去し、消毒すること。

#### 【包装】

1本／箱

#### 【製造販売業者の名称及び住所等】

株式会社 高山医療機械製作所

本社 東京都台東区谷中 3-4-4

TEL 03-3821-0249 FAX 03-3821-0344

#### 【販売元の名称及び住所】

村中医療器株式会社 総合センター

本社 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号

TEL 0725-53-5541 FAX 0725-53-5641