

類別器具機械 医療用はさみ 35

一般的名称 はさみ 35325001

販売名 プラムマイクロ剪刀

## 【禁忌禁止事項】

製品は【使用目的】に記載した目的以外に使用しないこと。  
また、購入後の本製品への二次的加工は行わないこと。

【構成】 マルテンサイトステンレス鋼 SUS420J<sup>®</sup>

## 【形状・構造等】

村中医療器(株)『ムラナカ総合カタログ』に準ずる。

品番・コード	品名
S-1	プラムマイクロ剪刀 全長 225mm 有効長 125mm 微弯バヨネット
S-2	プラムマイクロ剪刀 全長 160mm 有効長 60mm 微弯バヨネット
S-3	プラムマイクロ剪刀 全長 160mm 鈍先・直ストレート
S-4	プラムマイクロ剪刀 全長 160mm 鈍先・微弯ストレート
S-5	プラムマイクロ剪刀 全長 195mm 有効長 100mm 刃先小・直バヨネット
S-6	プラムマイクロ剪刀 全長 195mm 有効長 100mm 刃先小・微弯バヨネット
S-7	プラムマイクロ剪刀 全長 160mm 有効長 65mm 刃先小・直バヨネット
S-8	プラムマイクロ剪刀 全長 160mm 有効長 65mm 刃先小・微弯バヨネット
S-9	プラムマイクロ剪刀 全長 195mm 有効長 95mm 強弯バヨネット
S-10	プラムマイクロ剪刀 全長 195mm 有効長 95mm 微弯バヨネット

W-1	プラムマイクロ剪刀 全長 195mm 有効長 100mm 鈍先・直バヨネット
W-2	プラムマイクロ剪刀 全長 195mm 鈍先・下向きバヨネット
W-3	プラムマイクロ剪刀 全長 195mm 有効長 100mm 鈍先・微弯バヨネット
PS-1510	プラムマイクロ剪刀 全長 150mm 直
PS-1520	プラムマイクロ剪刀 全長 150mm 弯曲

## 【使用目的】

本品は、外科手術器具です。

## 【使用上の注意】

- 1, 使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
- 2, 使用目的以外の目的で使用しないこと。
- 3, 使用後、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄し除去すること。
- 4, 塩素系及びヨウ素系の消毒剤等、金属腐食の原因となる成分を含む薬剤の使用をなるべく避け、使用中に付着した場合は水洗いすること。

- 5, 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電・火傷する危険があり、また器具表面を損傷するので併用しないこと。

## 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1, 洗浄・乾燥後から使用するまでの保管中、良好な乾燥状態を保てる場所で保管すること。
- 2, 滅菌後に既滅菌状態で保管する場合、再汚染を防ぐ清潔で、かつ良好な乾燥状態が保てる場所に保管し、滅菌有効期限を管理すること。

## 【保守・点検に係る事項】

- 1, 使用後、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄

除去し、消毒すること。

2. 汚染除去に用いる洗剤は洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取扱い方法を守り使用すること。

【包装】1本／1箱

【製造販売業者の名称及び住所等】

株式会社 高山医療機械製作所

本社 東京都台東区谷中 3-4-4

Tel 03-3821-0249 Fax03-3821-0344

【販売元の名称及び住所】

村中医療器株式会社 総合センター

本社 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2

Tel 0725-53-5541 Fax 0725-53-5641