

類別器具機械 医療用剥離子 42

一般的名称 へら 13645000

販売名 プラム 上山. 谷川式剥離用ペラ

【禁忌禁止事項】

製品は【使用目的】に記載した目的以外に使用しないこと。
また、購入後の本製品への二次的加工は行わないこと。

【形状・構造等】

本製品はDLCコーティングを施しているため、硬質でかつ、耐磨耗性、科学的安定性、表面平滑性に優れている。

そのほか構造等は村中医療器(株)『ムラナカ総合カタログ』に準ずる。

品番	品名	規格	
KTP-120	プラム上山谷山式剥離ペラ 全周刃, 超微弯 先端1×2mm, 185センチ プレミアム	L 2mm	D 1mm
KTP-230	プラム上山谷山式剥離ペラ 全周刃, 超微弯 先端2mm×3mm, 185センチ プレミアム	L 3mm	D 2mm
KTP-340	プラム上山谷山式剥離ペラ 全周刃, 超微弯 先端3×4mm, 185mm プレミアム	L 4mm	D 3mm
KTP-1520	プラム上山谷山式剥離ペラ 全周刃, 超微弯 先端1.5×2mm, 185mm プレミアム	L 2mm	D 1.5mm

全周刃
丁微弯
185mm

【構成】ステンレス鋼

【使用目的】

本品は、外科手術器具です。

【使用上の注意】

- 1, 使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
- 2, 使用目的以外の目的で使用しないこと。

3, 使用後、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄し除去すること。

4, 塩素系及びヨウ素系の消毒剤等、金属腐食の原因となる成分を含む薬剤の使用をなるべく避け、使用中に付着した場合は水洗いすること。

5, 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電・火傷する危険があり、また器具表面を損傷するので併用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1, 洗浄・乾燥後から使用するまでの保管中、良好な乾燥状態を保てる場所で保管すること。

2, 滅菌後に既滅菌状態で保管する場合、再汚染を防ぐ清潔で、かつ良好な乾燥状態が保てる場所に保管し、滅菌有効期限を管理すること。

【保守・点検に係る事項】

1, 使用後、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄除去し、消毒すること。

2, 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取り扱い方法を守り使用すること。

3, 超音波洗浄装置は刃先部を鈍化する恐れがあることから、洗浄に用いないこと。ウォッシャー・ディスインフェクタ等の洗浄装置で洗浄する場合、固定具等で器具を固定し、汚れが落ちやすい状態でバスケット等に収納処理すること。

4, 仕上げすぎには、純水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨する。洗浄後、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

5, 滅菌前、使用前に汚れ・破損・可動部の動き等を点検すること。

6, 点検後、滅菌のための適切な包装を行い、高圧蒸気滅菌もしくはEOGガス滅菌を行うこと。その際、確実な滅菌ができる様に配慮すること。

7, 強アルカリ性や強酸性の洗剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあり、その使用を避けること。金属タワシ、クレンザー(磨き粉)等は器具表面を損傷するので使用を避けること。

【包装】 1本／箱

【製造販売業者の名称及び住所等】

株式会社 高山医療機械製作所

本社 東京都台東区谷中 3-4-4

TEL 03-3821-0249 FAX 03-3821-0344

【販売元の名称及び住所】

村中医療器株式会社 総合センター

本社 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号

TEL 0725-53-5541 FAX 0725-53-5641