

類別 器具機械(30) 医療用結紮器及び縫合器

一般的名称 持針器 12726010

販売名 スーパーバイパス剪刀付き持針器

【禁忌禁止事項】

製品は【使用目的】に記載した目的以外に使用しないこと。
また、購入後の本製品への二次的加工は行わないこと。

【形状・構造等】

SB-16NC-MZ-S1	スーパーバイパス剪刀付き持針器 ストレート型 全長 160mm 先端小
SB-16NC-MZ-L1	スーパーバイパス剪刀付き持針器 ストレート型 全長 160mm 先端大
特注	スーパーバイパス剪刀付き持針器 病院の症例および部位に対応

【組成】 ステンレス鋼

【使用目的】 本品は、外科手術器具です。

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
2. 使用目的以外の目的で使用しないこと。
3. 使用後、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄し除去すること。
4. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤等、金属腐食の原因となる成分を含む薬剤の使用をなるべく避け、使用中に付着した場合は水洗いすること。
5. 電気メスをを用いた接触凝固は、術者が感電・火傷する危険があり、また器具表面を損傷するので併用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 洗浄・乾燥後から使用するまでの保管中、良好な乾燥状態を保てる場所で保管すること。
2. 滅菌後に既滅菌状態で保管する場合、再汚染を防ぐ清潔で、かつ良好な乾燥状態が保てる場所に保管し、滅菌有効期限を管理すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・消毒、滅菌
 - 1) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄し、消毒する。
 - 2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取扱方法を守る。中性洗剤を推奨する[酸性及びアルカリ性洗剤は、アルミニウムを腐食させる原因となることがある]。
 - 3) 超音波洗浄装置・ウォッシャーディスインフェクター等の洗浄装置で洗浄する場合、可動部分は開放し、汚れが落ちやすい状態でバスケット等に収納して処理する。
 - 4) 金属タワシ、クレンザー（磨き粉）等は、器具表面を損傷するので使用を避ける。
 - 5) 仕上げすすぎには、精製水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨する。
 - 6) 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥する。
 - 7) 手術器具用潤滑剤の塗布を推奨する[可動部の防錆のため]。
 - 8) 滅菌についてはオートクレーブもしくはEOGガス滅菌を推奨する。
オートクレーブ推奨条件は以下の通りである。

滅菌温度 132 度／滅菌時間 4 分／乾燥時間最低 30 分

2. 点検
滅菌前、使用前に汚れ・破損・可動部の動き等を点検する。

【包装】 1 本／箱

【製造販売業者の名称及び住所等】

株式会社 高山医療機械製作所
本社 東京都台東区谷中 3-4-4
TEL 03-3821-0249 FAX 03-3821-0344