

ご使用の際は、添付文書をよくお読みください

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

Exスワブ003T

(輸送チューブ付直腸使用滅菌綿棒)



再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】**1. 形状・構造**

本品はプラスチック軸の先端部に細毛を配した綿棒です。軸側にはキャップ機能を設け、検体採取後の綿棒を格納・輸送できる容器(輸送チューブ)に包装されています。

本品の各材質

綿球部分 : ポリアミド(淡黄色)
軸部分 : ポリアミド(白色半透明)
外装チューブ : ポリプロピレン
キャップ : ポリエチレン

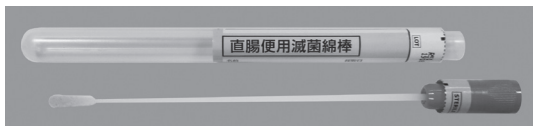
本品の寸法

綿棒全長 : 150 mm

外装チューブ包装状態(未開封)



開封後のスワブと外装チューブ

**2. 包装**

Exスワブ003T (輸送チューブ付直腸使用滅菌綿棒) 30本入り
(10本×3袋) 1箱
(商品番号: 325297)

3. 滅菌・包装袋等

本品は滅菌済です。

【使用目的】

本品はウイルス検査や細菌検査の検体を採取するための綿棒(滅菌済)とそれを一時的に収納し、検査場所まで輸送する際の検体による二次感染の防止を目的として使用する綿棒輸送容器です。本品は直腸に存在する糞便(直腸便)の採取に適しています。

【使用方法等】

- 1) 輸送チューブの封印部分を開封し、綿球に触れないようにキャップを持って綿棒を取り出し、そのまま検体の採取に使用します。
- 2) 検体を採取した後、綿棒を輸送チューブに挿し戻し、キャップがそれ以上奥に行かなくなるまで挿入してください。
- 3) 必要に応じて検体採取に関する情報を輸送チューブのラベルに記載します。

【使用上の注意】**<重要な基本的注意>**

- 1) 本品の使用は1回限りです。
- 2) 本品は直腸便採取専用です。排泄便採取には使用できません。
- 3) 開封後は速やかに使用してください。

- 4) 本品は滅菌済みですので、輸送チューブに破損や汚染の疑いがある場合には使用しないでください。
- 5) 製品に破損(軸の白化)や折れ曲がり、汚れがあった場合には使用しないでください。
- 6) 本品を使用するときは下記の点に留意し、軸を折らないように注意してください。
 - ・使用前に綿棒をしなせたり、変形させずにご使用ください。
 - ・力を入れて押し込んだり、綿棒をねじったりしないでください。
 - ・抵抗や異常等を感じた際には、操作を中止してください。
 - ・使用時に曲がったり、軸が白化した場合は使用を中止してください。
- 7) 臨床検体の取り扱いの際には、感染の危険のあるものとして保護具(眼鏡、手袋、マスク等)を着用の上、十分注意をして操作してください。
- 8) 本品を使用後は、滅菌処理してから廃棄してください。廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理してください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法: 2~30℃に凍結を避けて保管してください。

水濡れに注意し、直射日光及び多湿を避けて清潔な場所に保管してください。

有効期間: 使用期限は外箱及び個包装袋に記載してあります。

使用期限が切れたものは使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】製造元 コパニタリア エスビーエー
(外国製造業者) Copan Italia S.p.A. (イタリア)

製造販売元

デンカ株式会社

東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

問い合わせ先

デンカ株式会社 試薬学術担当

〒103-8338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

フリーダイヤル 0120-206-072

受付時間 9:30~17:30 (土日祝日・弊社休業日を除く)