

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 71105001
*BAKUNE アパレル

【禁忌・禁止】


- 湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常がある時は使用しないこと。
- 異常(かゆみ、かぶれなど)を感じたら、ご使用を中止すること。

【形状・構造及び原理等】


1. 形状、構造

*1. セルフレーム裏毛

*1-1 長袖シャツ

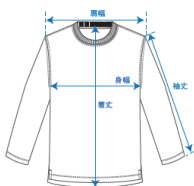

*1-2 ロングパンツ

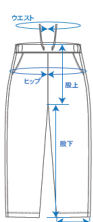


寸法 (単位: cm/交差; ±10%)


トップス					
サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈	
XS	57.5~102	46~57	52~55	46.5~53	
S	60.5~104	47.5~58.5	54~57	48.25~54.75	
M	63.5~106	49~60	56~59	50~56.5	
L	66.5~108	50.5~61.5	58~61	51.75~58.25	
XL	69.5~110	52~63	60~63	53.5~60	
2XL	72.5~112	53.5~64.5	62~65	55.25~61.75	
3L	78	58	65	60	
4L	80	60	70	61	
5L	82	62	75	62	
6L	84	64	80	63	
7L	86	66	85	64	
8L	88	68	90	65	

ロングパンツ					
サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下	裾幅
XS	54~63	88	23.5~29	63~68	10~15.5
S	60~69	94	24.5~30	65~70	11~16.5
M	66~75	100	25.5~31	67~72	12~17.5
L	72~81	106	26.5~32	69~74	13~18.5
XL	78~87	112	27.5~33	71~76	14~19.5
2XL	84~93	118	28.5~34	73~78	15~20.5
3L	84	130	34	70	13.5
4L	94	137	36	70	14
5L	104	145	38	70	14.5
6L	114	154	40	70	15
7L	124	162	42	70	15.5
8L	134	170	44	70	16

*1-3 パジャマ長袖

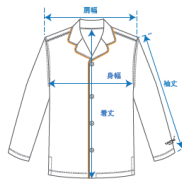

*1-4 パジャマロングパンツ

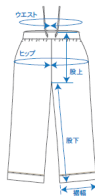


トップス					
サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈	
XS	67	43	53	53.5	
S	69	44.5	55	55.25	
M	71	46	57	57	
L	73	47.5	59	58.75	
XL	75	49	61	60.5	
2XL	77	50.5	63	62.25	


ロングパンツ					
サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下	裾幅
XS	61	97	26.5	63.5	22
S	67	103	27.5	65.5	23
M	73	109	28.5	67.5	24
L	79	115	29.5	69.5	25
XL	85	121	30.5	71.5	26
2XL	91	127	31.5	73.5	27

*2. セルフレーム天竺

*2-1 半袖シャツ

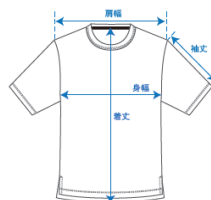

*2-2 ハーフパンツ

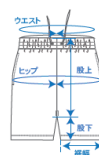


半袖シャツ					
サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈	
XS	56~102	42.5~47.5	48~54	9.25~20.25	
S	59~104	44~49	50~56	11~22	
M	62~106	45.5~50.5	52~58	12.75~23.75	
L	65~108	47~52	54~60	14.5~25.5	
XL	68~110	48.5~53.5	56~62	16.25~27.25	
2XL	71~112	50~55	58~64	18~29	

ハーフパンツ					
サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下	裾幅
XS	54~62	89~91	26~27	10~17	23.5~28
S	60~68	95~97	27~28	11~19	25~30
M	66~74	101~103	28~29	12~21	26.5~32
L	72~80	107~109	29~30	13~23	28~34
XL	78~86	113~115	30~31	14~25	29.5~36
2XL	84~92	119~121	31~32	15~27	31~38

*2-3 長袖シャツ




*2-4 ロングパンツ

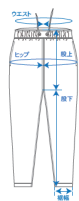


長袖シャツ				
サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈
XS	56~102	46.75~48	48~54	46~53
S	59~104	48.25~49.5	50~56	47.75~54.75
M	62~106	49.75~51	52~58	49.5~56.5
L	65~108	51.25~52.5	54~60	51.25~58.25
XL	68~109	52.75~54	56~62	53~60
2XL	71~110	54.25~55.5	58~64	54.75~61.75

ロングパンツ					
サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下	裾幅
XS	52~63	82~93	23.5~29	34.5~68	14~21
S	58~69	88~99	24.5~30	36.5~70	15~22
M	64~75	94~105	25.5~31	38.5~72	16~23
L	70~81	100~111	26.5~32	40.5~74	17~24
XL	76~87	106~117	27.5~33	42.5~76	18~25
2XL	82~93	112~123	28.5~34	44.5~78	19~26

*2-3 パジャマ長袖

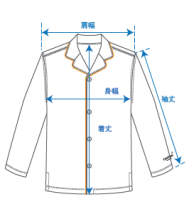

*2-4 パジャマロングパンツ

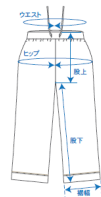

パジャマ長袖				
サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈
XS	67	43	53	53.5
S	69	44.5	55	55.25
M	71	46	57	57
L	73	47.5	59	58.75
XL	75	49	61	60.5
2XL	77	50.5	63	62.25

パジャマロングパンツ					
サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下	裾幅
XS	61	97	26.5	63.5	22
S	67	103	27.5	65.5	23
M	73	109	28.5	67.5	24
L	79	115	29.5	69.5	25
XL	85	121	30.5	71.5	26
2XL	91	127	31.5	73.5	27

2. 原理

本品は原材料半導体高純度セラミックを定着させる加工が施されており、身体から放出される体熱を伝導、吸収し遠赤外線領域の波長を放出（輻射）し、遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状を改善する衣類型の医療機器である。

*【使用目的又は効果】

遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状を改善する。

【血行促進作用効果】

- 疲労軽減
- 血行促進、血流改善による肩こり、腰痛の緩和
- 筋肉のハリ、コリの軽減
- 血行促進による血流改善
- 筋疲労症状の改善
- 疲労回復

【使用方法等】

本品は再使用可能である。

- 本品に破損がないことを確認する。
- 衣類として着用する。
- 日常活動時及び睡眠時のいずれでも着用可能である。
- 本品は再使用可能。
- 本品の効果には個人差があるため、20日以上長期着用が望ましい。
- 睡眠時の着用は、発汗作用が高まることから、十分な水分補給を行うこと。

【使用上の注意】

- 湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常がある時は使用しないこと。
- 異常(かゆみ、かぶれなど)を感じたら、ご使用を中止すること。
- 洗濯で色落ち、移染する場合があるので他の物と分けて洗濯すること。
- 着用や洗濯、摩擦により他の物に色移りや、プリントが剥がれる場合があるので注意すること。
- 長時間水に浸けたり、濡れたまま重ね置きしたりすると、淡色部や他の物に色移りする場合があるので注意すること。
- 蛍光増白剤の入っていない洗剤をご使用すること。
- タンブラー乾燥の使用は、避けること。
- 長時間の摩擦や揉み作用で毛玉が出来やすいので、注意すること。
- 目立つ毛玉は、ハサミや毛玉取り器で取り除くこと。
- 湿気や日光(紫外線)の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じたりする場合があるので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境を避けて保管すること。
- しばらく使用しない時は一度干してから、湿気のない場所で保管すること。
- 有効期限：2年間

【包装】

1枚/袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ファーストメディカル株式会社

【問い合わせ先】

TENTIAL

株式会社 TENTIAL

問い合わせ先電話番号：03-6455-2921