

\*2023年10月（第2版）  
 \*\*2024年1月（第3版）  
 \*\*\*2024年4月（第4版）

医療機器製造販売届出番号：13B1X10360000029

医療用品 04 整形用品  
 一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 71105001

RECOVERY CARE+ リハビリケアプラス

【禁忌・禁止】

- 湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常がある時は使用しないこと。
- 異常(かゆみ、かぶれなど)を感じたら、ご使用を中止すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

\*1. プレーティング天竺

\*\*\*1-1. 長袖Tシャツ



	S	M	L	LL	3L
着丈	67.5	70	72	74	76
身幅	53.5	57	60	63.5	67

\*\*\*1-2. ロングパンツ



	S	M	L	LL	3L
ウエスト	72	78	84	91	98
股下	69.5	72	74	76	78

\*\*1-3. 5分袖シャツ



	S	M	L	LL	3L
着丈	67	69	71	73.5	75.5
身幅	53	56	59	62.5	66


\*\*1-4. 7分丈パンツ



	S	M	L	LL	3L
ウエスト	72	78	84	91	98
股下	51	53	55	57	59


\*2. ポンチ

\*2-1. ロングスリーブトップス

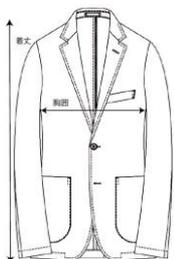

	S	M	BM	L	BL	LL	BLL
着丈	67	69	69	71	71	73	73
胸囲	101.5	105.5	110.5	109.5	114.5	113.5	118.5

\*2-2. ロングパンツ

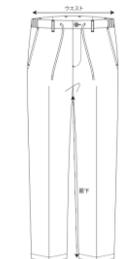

	S	M	L	LL	3L
ウエスト	76	80	84	88	92
股下	70	70	74	74	74

寸法（単位：cm/公差：±10%）

2. 原理

本品は原材料繊維に高純度セラミックを定着させ、一定程度の遠赤外線を輻射することによる遠赤外線血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状改善を行うことを目的とした、衣類形状の医療機器である。

【使用目的又は効果】

【遠赤外線血行促進作用】

- 疲労回復
- 血行促進
- 筋肉の力、コリの緩和
- 筋肉の疲れを軽減

【使用方法等】

本品は繰返し使用可能です。

- 本品に破損がないことを確認する。
- 衣類として着用する。
- 日常生活時及び睡眠時のいずれでも着用可能である。
- 本品の効果には個人差があるため、長期間の着用が望ましい。

【使用上の注意】

- 睡眠時の着用は、発汗作用が高まることから、十分な水分補給を行うこと。
- 湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常がある時は使用しないこと。
- 異常(かゆみ、かぶれなど)を感じたら、使用を中止すること。
- お洗濯の際は、洗濯ネットを使用してください。
- 蛍光増白剤の入っていない洗剤を使用してください。
- アイロンの際はあて布をしてください。
- 濡れた状態で放置しますと他のものに色移りする可能性があります。
- 着用や洗濯、摩擦による他の物への色移りにご注意ください。
- 素材の特性上、長時間の摩擦や揉み作用で毛玉が出来やすいので、ご注意ください。
- 毛玉が出来てしまった場合は、毛玉取り器やはさみなどでお手入れください。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境を避けて保管すること。
- しばく使用しない時は一度干してから、湿気のない場所で保管すること。

【耐用期間】

2年

【取扱い上の注意】

- 本品は繰返し使用可能ですが、素材の特性上、湿気や日光（紫外線）の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じたりする場合がありますので、ご注意ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ファーストメディカル株式会社

【販売業者】

販売業者：株式会社 AOKI

〒224-8688 神奈川県横浜市中区南區葛が谷 6-56

ご使用前に必ずこの文書をお読みください