

2024年7月(第1版)

医療機器製造販売届出番号：13B1X10360000040

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 71105001

MIGARU Tech Sweat (ミガル テックスウェット)

【禁忌・禁止】

- 湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常がある時は使用しないこと。
- 異常(かゆみ、かぶれなど)を感じたら、ご使用を中止すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造


寸法 (単位: cm/公差: ±10%)

1 スウェットシャツ



サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈
XS	59-114	47-57.5	48.5-55	49.5-61.75
S	62-117	48.5-59	50.5-58	51.25-63
M	65-120	50-60.5	52.5-61	53-64.25
L	68-123	51.5-62	54.5-64	54.75-66
XL	71-125	53-63.5	56.5-68	56.5-67.75
2XL	73-128	54.5-65	58.5-71	58.25-69.5

2 スウェットロングパンツ

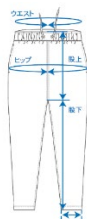


サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下	裾幅
XS	63	94	28	66	10
S	69	100	29	68	11
M	75	106	30	70	12
L	81	112	31	72	13
XL	89	120	32	74	14
2XL	95	126	33	76	15

3 フードパーカー




サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈
XS	59-61	51.5-57.5	52-55	58.75-61.75
S	62-64	53-59	55-58	60-63
M	65-67	54.5-60.5	58-61	61.25-64.25
L	68-70	56-62	61-64	63-66
XL	71-73	57.5-63.5	65-68	64.75-67.75
2XL	74-76	59-65	68-71	66-69

4 コーチャケット

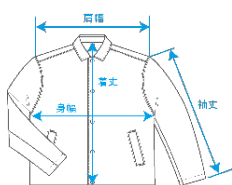


サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈
XS	63	47.5	55	54.75
S	66	49	58	56
M	69	50.5	61	57.25
L	72	52	64	59
XL	75	53.5	68	60.75
2XL	78	55	71	62

5 チュニック

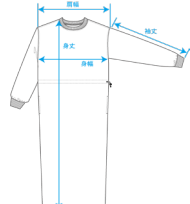


サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈
S	117	48.5	50.5	49.5
M	120	49.5	52.5	51
L	123	50.5	54.5	52.5

6 ジャケット

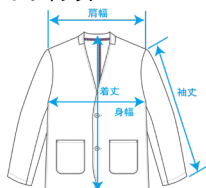

サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈
XS	63	41	47	57
S	66	42.5	50	58.25
M	69	44	53	59.5
L	72	45.5	56	61.25
XL	75	47	60	63
2XL	78	48.5	63	64.25

7 ロングパンツ

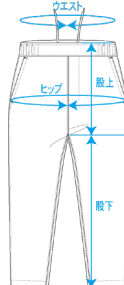

サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下	裾幅
XS	63	93	28	65	15
S	69	99	29	67	16
M	75	105	30	69	17
L	81	111	31	71	18
XL	89	119	32	73	19
2XL	95	125	33	75	20

2. 原理

本品は原材料繊維に高純度セラミックを定着させる加工が施されており、身体から放出される体熱を伝導、吸収し遠赤外線領域の波長を放出（輻射）し、遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状を改善する衣類型の医療機器である。

*【使用目的又は効果】

遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状を改善する。

【血行促進作用効果】

- 疲労軽減
- 血行促進、血流改善による肩こり、腰痛の緩和
- 筋肉のハリ、コリの軽減
- 血行促進による血流改善
- 筋疲労症状の改善
- 疲労回復

【使用方法等】

本品は再使用可能である。

- 本品に破損がないことを確認する。
- 衣類として着用する。
- 日常活動時及び睡眠時のいずれでも着用可能である。
- 本品は再使用可能。
- 本品の効果には個人差があるため、20日以上での長期着用が望ましい。
- 睡眠時の着用は、発汗作用が高まることから、十分な水分補給を行うこと。

【使用上の注意】

- 湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常がある時は使用しないこと。
- 異常(かゆみ、かぶれなど)を感じたら、ご使用を中止すること。
- 洗濯で色落ち、移染する場合があるので他の物と分けて洗濯すること。
- 着用や洗濯、摩擦により他の物に色移りや、プリントが剥がれる場合があるので注意すること。
- 長時間水に浸けたり、濡れたまま重ね置きしたりすると、淡色部や他の物に色移りする場合があるので注意すること。
- 蛍光増白剤の入っていない洗剤をご使用すること。
- タンブラー乾燥の使用は、避けること。
- 長時間の摩擦や揉み作用で毛玉が出来やすいので、注意すること。
- 目立つ毛玉は、ハサミや毛玉取り器で取り除くこと。
- 湿気や日光(紫外線)の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じたりする場合があるので注意すること。

ご使用前に必ずこの文章をお読みください

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境を避けて保管すること。
- しばらく使用しない時は一度干してから、湿気のない場所で保管すること。
- 有効期限：2 年間

【包装】

1 枚/袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ファーストメディカル株式会社

【問い合わせ先】**TENTIAL**

株式会社 TENTIAL

問い合わせ先電話番号：03-6455-2921