

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 71105001

R WEAR リカバリーウェア P


【禁忌・禁止】

- 湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常がある時は使用しないこと。
- 異常(かゆみ、かぶれなど)を感じたら、ご使用を中止すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造

1. リカバリースリーブウェア トップス

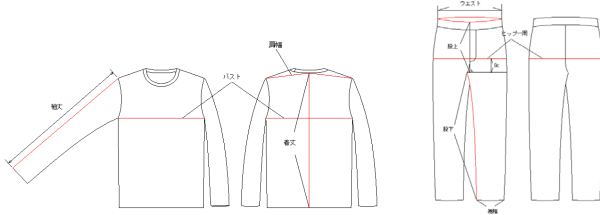

寸法 (単位: cm/交差: ±10%)

トップス				
サイズ	着丈	肩幅	バスト	袖丈
S	68	44	110	59
M	70	46	114	60.5
L	72	48	118	62
XL	74	50	122	63.5

ロングパンツ					
サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下	裾幅
S	72	103	25	66	16
M	76	107	25.5	68	16.5
L	80	111	26	70	17
XL	84	115	26.5	72	17.5

2. 原理

本品は粉炭由来の活性炭を定着させた原材料繊維により、身体から放出される体熱を伝導、吸収し遠赤外線領域の波長を放出（輻射）し、遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状を改善する衣類型の医療機器である。

【使用目的又は効果】

遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状を改善する。

【血行促進作用効果】

- 疲労軽減
- 血行促進
- 筋肉のハリ、コリの軽減
- 血行促進による血流改善
- 筋疲労症状の改善
- 疲労回復

【使用方法等】

本品は再使用可能である。

- 本品に破損がないことを確認する。
- 衣類として着用する。
- 日常活動時及び睡眠時のいずれでも着用可能である。
- 本品の効果には個人差があるため、20日以上での長期着用が望ましい。
- 睡眠時の着用は、発汗作用が高まることから、十分な水分補給を行うこと。

【使用上の注意】

- 湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常がある時は使用しないこと。
- 異常(かゆみ、かぶれなど)を感じたら、使用を中止すること。
- 洗濯で色落ち、移染する場合があるので他の物と分けて洗濯すること。
- 着用や洗濯、摩擦により他の物に色移りや、プリントが剥がれる場合があるので注意すること。
- 長時間水に浸けたり、濡れたまま重ね置きしたりすると、淡色部や他の物に色移りする場合があるので注意すること。
- 蛍光増白剤の入っていない洗剤を使用すること。
- タンブラー乾燥の使用は、避けること。
- この製品の生地は、表面が引っ掛かりやすいため、着用時や着脱時に、指輪やバッグなど身の回り品との摩擦や引っ掛かりに注意すること。
- 洗濯やクリーニングの際は、裏返しで処理するかネットを使用すること。
- 長時間の摩擦や揉み作用で毛玉が出来やすいので、注意すること。
- 目立つ毛玉は、ハサミや毛玉取り器で取り除くこと。
- 湿気や日光(紫外線)の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じたりする場合があるので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境を避けて保管すること。
- しばらく使用しない時は一度干してから、湿気のない場所で保管すること。
- 有効期限：2 年間

【包装】

1 枚/袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ファーストメディカル株式会社

【問い合わせ先】

株式会社サプリム

問い合わせ先メールアドレス：rwear-info@supplym.com