

Baxter

医療用品 4 整形用品
医療ガーゼ

一般医療機器	
届出番号	13B1X90001000001
JMDNコード	13700000

CAPDカテーテルケアキット

再使用禁止

【禁忌・禁止】


再使用禁止

<使用方法に関連する使用上の注意>

本品はエチレンオキサイドガス滅菌済みにつき、包装開封後、直ちに1回限りの使用とし、再滅菌、再使用しないで下さい。

【形状・構造及び原理等】

本品は、医療ガーゼと綿棒で構成されたキット製品です。

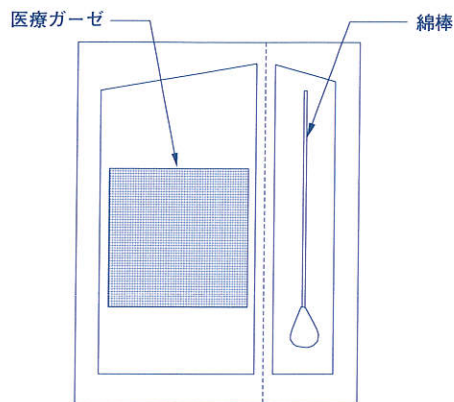

【使用上の注意】

重要な基本的注意

汚染した可能性のある本品を使用した場合は、使用を中止し医療機関の指示に従って下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

室温にて保管して下さい。
直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管して下さい。

【包装】

30セット／箱

【使用目的】

腹膜透析患者における腹膜透析用カテーテルの出口部皮膚を、感染予防のために汚染から保護し、清潔に保つことを使用目的とします。

【品目仕様等】

エチレンオキサイドガス滅菌済みです。

【操作方法又は使用方法等】

- ・開封前に包装に破れ、傷、汚れがないことを確認して下さい。
- ・本品に変色、ヒビ、変形、劣化、破損があった時は使用しないで下さい。

1. 綿棒とガーゼの入った包装をそれぞれ点線より分けます。
2. 綿棒を包装から取り出し、消毒液をしみ込ませます。
3. 綿棒を用いてカテーテル出口から外側周辺に向けて皮膚を消毒し、よく乾燥させます。
4. ガーゼを包装から取り出し、清潔操作にて、出口部にテープなどで固定します。
5. 使用済みの綿棒を捨てます。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】*

製造販売元**

バイリーンクリエイト株式会社
〒104-0045 東京都中央区築地五丁目6番4号
電話番号：03-4546-1183

製造元

バンフィック技研株式会社
滋賀県野洲市野洲1772-8

発売元**

バクスター株式会社
〒104-6009 東京都中央区晴海一丁目8番10号
電話番号：03(6204)3700〔ダイヤルイン〕

製造販売元

バイリーン クリエイト株式会社

東京都中央区築地五丁目6番4号

発売元

バクスター株式会社

東京都中央区晴海一丁目8番10号

JLRD0D-01D007