

**2010 年 9 月 13 日改訂（第 4 版）

*2005 年 4 月 30 日改訂（第 3 版）

届出番号：13B2X00023000001

医 4 整形用品 13700000 医療ガーゼ 一般医療機器

Y ガーゼ（未滅菌）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

体内に留置しないこと

【形状・構造等】

綿 100%ガーゼを折り畳んだ後に、切り込みを入れたもの

*【使用目的、効能又は効果】

*出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう

*【品目仕様等】

*水の吸収性能は自重の約 7 倍を示す

【操作方法又は使用方法】

衛生材料として適宜滅菌して使用すること

【使用上の注意】

体内に残らないように使用すること

**裁断部より乱糸が出るので、体内や器具などへの落下に注意すること

【貯蔵方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

*小児の手の届かないところに保管すること

【包装】

*内容量および単位：パッケージに記載

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

*製造販売業者 白十字株式会社

〒171 -8552 東京都豊島区高田 3 -23 -12

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120 -01 -8910 （休日・夜間 TEL 03 -3987 -6111）

*製造業者 白十字株式会社