

\*2005年7月22日改訂(第2版)

2001年12月13日作成(新様式第1版)

届出番号: 13B2X00023000003

医4 整形用品 34655000 医療用不織布 一般医療機器

# シングルドレーンスワブ

再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

再使用禁止

体内に留置しないこと

## 【形状・構造等】

脱脂綿(綿100%)を水流により絡め布状にしたものを重ね、切り込みを入れたもの

## \*【使用目的、効能又は効果】

\*創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう

## 【操作方法又は使用方法】

衛生材料として適宜滅菌して使用すること

## 【使用上の注意】

繊維が患部に残らないように注意すること

包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は使用しないこと

開封後は早めに使用すること

滅菌して使用する場合は再滅菌しないこと

## 【貯蔵方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

\*小児の手の届かないところに保管すること

## 【包装】

\*内容量および単位: パッケージに記載

## \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

問い合わせ(お客様相談室) TEL 0120-01-8910 (休日・夜間 TEL 03-3987-6111)

製造業者 白十字株式会社