

*2005年7月22日改訂(第2版)

2002年3月7日作成(新様式第1版)

届出番号: 13B2X00023000007

医4 整形用品 34654000 手術用被覆・保護材 一般医療機器

シングルパッドA

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

裁断加工禁止

体内に深く挿入し、埋め込み又は留置をしないこと

【形状・構造等】

表面材: 脱脂綿

吸収材: レーヨン・紙・高吸水性樹脂

防水材: ポリエチレン・ポリプロピレン

これらを結合剤(ホットメルト)でシート状に一体化したもの

*【使用目的、効能又は効果】

*術後創傷のために用いる適切なサイズの被覆・保護材をいう

*【品目仕様】

*生理食塩液の吸収性能は、自重の5倍以上を示す

*【操作方法又は使用方法】

衛生材料として適宜滅菌して使用すること

【使用上の注意】

防水材側を創部側に使用しないこと(吸収しないため)

開封後は早めに使用すること

包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと

滅菌して使用する場合は再滅菌しないこと

(*滅菌方法はエチレンオキサイドガス滅菌を推奨 蒸気滅菌には適していない 電子線滅菌等のその他滅菌方法は、データ不足により不可)

【貯蔵方法及び使用期間等】

*直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

*小児の手の届かないところに保管すること

使用期限: パッケージに記載[自己認証(自社データ)による]

【包装】

*内容量および単位: パッケージに記載

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社 〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-1

問い合わせ(お客様相談室) TEL 0120-01-8910 (休日・夜間 TEL 03-3987-6111)

製造業者 白十字株式会社