

\*\*2005年8月8日改訂(第4版)

\*2003年1月25日改訂(第3版)

\*\*届出番号: 13B2X00023000011

医4 整形用品 13700000 医療ガーゼ 一般医療機器

# 白十字折りガーゼ滅菌済

再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止

体内に留置しないこと

## 【形状・構造及び原理等】

綿100%のガーゼを折り畳んだもの

## \*\*【使用目的、効能又は効果】

\*\*出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう

## \*\*【品目仕様等】

水の吸収性能は、自重の約7倍を吸収する

## \*\*【操作方法又は使用方法等】

本品を無菌的に滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに、1回限り使用する

## 【使用上の注意】

包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は滅菌品として使用しないこと

一度開封したものは、滅菌状態が保てないので、開封後全量を消費すること

## \*\*【貯蔵・保管方法及び使用期限等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

\*小児の手の届かないところに保管すること

使用期間：滅菌袋に記載[自己認証(自社データ)による]

## 【包装】

\*\*内容量および単位：パッケージに記載

## \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

問い合わせ (お客様相談室) TEL 0120-01-8910 (休日・夜間 TEL 03-3987-6111)

製造業者 白十字株式会社