

*2005 年 7 月 19 日改定（第 2 版）

2001 年 12 月 13 日作成（新様式第 1 版）

届出番号：13B2X00023000020

医 4 整形用品 11028000 コットンボール 一般医療機器

白十字系付き綿球（未滅菌）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

体内に留置しないこと

【形状・構造等】

脱脂綿（綿 100%）を球状に丸めたものに、糸（綿 100%）をつけたもの

*【使用目的、効能又は効果】

*様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう

*【品目仕様等】

*水の吸収性能は自重の約 20 倍を示す

*【操作方法又は使用方法】

衛生材料として適宜滅菌して使用すること

【使用上の注意】

本品の糸を強く引っ張ると、綿球から糸が抜けるおそれがある

*直接患部に使用するとき、滅菌して使用し、繊維が患部に残らないように注意すること

包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は使用しないこと

開封後は早めに使用すること

滅菌して使用する場合は再滅菌しないこと

綿の表面や内部に黄色又は黒色の斑点状のものがみつかることがあるが綿の実殻であるため使用上に支障はない

【貯蔵方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

*小児の手の届かないところに保管すること

【包装】

*内容量および単位：パッケージに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

*製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910 （休日・夜間 TEL 03-3987-6111）

*製造業者 白十字株式会社