

\*\*2006 年 2 月 21 日改訂（第 3 版）

\* 2005 年 7 月 22 日改訂（第 2 版）

届出番号: 13B2X00023000025

医 4 整形用品 34655000 医療用不織布 一般医療機器

## ニューディスポガーゼ

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

体内に留置しないこと

### 【形状・構造等】

セルロース繊維（Lyocell）を水流により絡め布状にしたもの

### 【使用目的、効能又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう

### 【操作方法又は使用方法】

衛生材料として適宜滅菌して使用すること

直接患部に使用するときには、滅菌して使用すること

### 【使用上の注意】

体内に残らないように使用すること

包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は使用しないこと

開封後は早めに使用すること

滅菌して使用する場合は再滅菌しないこと

### \*\* 【貯蔵方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

\*小児の手の届かないところに保管すること

### 【包装】

\*内容量および単位：パッケージに記載

### 【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910 （休日・夜間 TEL 03-3987-6111）

製造業者 白十字株式会社