

*2005 年 7 月 20 日改訂（第 2 版）

2001 年 5 月 8 日作成（新様式第 1 版）

届出番号：13B2X00023000028

*医 4 整形用品 13705000 X 線造影材入りスポンジ 一般医療機器

ハクジュウジオパーゼX P

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止 / 体内に留置しないこと

*X 線造影系部分をつかまないこと / ガーゼや X 線造影系に強い負荷がかからないように使用すること

（X 線造影系を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に残存するおそれがある）

【形状・構造等】

綿 100%の平織りガーゼ数枚を重ね、綿 100%の糸で縫製したもの 通常は 4 角形で、その 1 角に体内残留を防ぐ目的で綿テープを取りつけてあるものもある

体内残留防止のため X 線造影用の糸を 1 本以上含有している

X 線造影系：硫酸バリウムを含有したポリプロピレン繊維の数十本を収束し、ポリエステルでラセン状にラッピングし糸状としたもの（わかりやすいように有色としてある）

*【使用目的、効能又は効果】

*出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする X 線で検知可能な成分を含有する器具をいう

*【操作方法又は使用方法】

衛生材料として適宜滅菌して使用すること

滅菌方法は、X 線造影糸がポリプロピレンなので、エチレンオキシドガス滅菌を推奨 蒸気滅菌の場合には、135 度以下で滅菌すること 電子線滅菌等のその他滅菌方法は、データ不足により不可

【使用上の注意】

体内に留置しないこと

*ごくまれに電気メス等の使用により引火することがある

【貯蔵方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

*小児の手の届かないところに保管すること

【包装】

*内容量および単位：パッケージに記載

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

*製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910 （休日・夜間 TEL 03-3987-6111）

*製造業者 白十字株式会社