

*2005 年 7 月 22 日改訂（第 2 版）

2003 年 10 月 16 日作成（新様式第 1 版）

届出番号: 13B2X00023000031

医 4 整形用品 34654000 手術用被覆・保護材 一般医療機器

ハクジュウジサージカルパット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

裁断加工禁止

体内に深く挿入し、埋め込み又は留置をしないこと

【形状・構造等】

脱脂綿（綿 100%）をガーゼ（綿 100%）もしくは
不織布（セルロース 100%）で挟み込み圧着したもの
形状は 4 角形で、向かい合う 2 辺を接着されたもの

* 【使用目的、効能又は効果】

*術後創傷のために用いる適切なサイズの保護材をいう

* 【操作方法又は使用方法】

衛生材料として適宜滅菌して使用すること

【使用上の注意】

裁断面から糸がほつれることがあるので、体内に残らない

ように使用すること

包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は使用しないこと

開封後は早めに使用すること

滅菌して使用する場合は再滅菌しないこと

(*滅菌方法はエチレンオキシドガス滅菌を推奨 蒸気滅菌には適していない 電子線滅菌等のその他滅菌方法は、データ不足により不可)

【貯蔵方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

*小児の手の届かないところに保管すること

【包装】

内容量および単位：パッケージに記載

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

*製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910 （休日・夜間 TEL 03-3987-6111）

*製造業者 白十字株式会社

