

*2005年7月19日改訂(第2版)

2002年1月20日作成(新様式第1版)

*届出番号: 13B2X00023000035

医4 整形用品 70975000 医療脱脂綿 一般医療機器

ハクジュウジ脱脂綿

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

体内に留置しないこと

【形状・構造等】

綿100%の脱脂綿(用途に合わせて使用者が適当なサイズに裁断又は、剥がして使用できるもの)

*【使用目的、効能又は効果】

*医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう

*【品目仕様等】

*水の吸収性能は自重の約20倍を示す

*【操作方法又は使用方法】

*衛生材料として適宜使用者が使用用途に応じて裁断し、又は剥がし、又は巻きつけて使用すること

直接患部に使用するときには、滅菌して使用すること

【使用上の注意】

繊維が患部に残らないように注意すること

包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は使用しないこと

開封後は早めに使用すること

滅菌して使用する場合は再滅菌しないこと

綿の表面や内部に黄色又は黒色の斑点状のものがみつかることがあるが綿の実殻であるため使用上に支障はない

【貯蔵方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

*小児の手の届かないところに保管すること

【包装】

*内容量および単位: パッケージに記載

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

問い合わせ(お客様相談室) TEL 0120-01-8910 (休日・夜間 TEL 03-3987-6111)

製造業者 白十字株式会社