

*2005 年 8 月 3 日改訂（第 2 版）

2002 年 5 月 13 日作成（新様式第 1 版）

届出番号：13B2X00023000056

医 4 整形用品 32374000 X 線造影材入りガーゼ 一般医療機器

ハクジュウジベルX P 滅菌済

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止・再滅菌禁止 / 体内に留置しないこと
- X 線造影系部分をつかまないこと / ガーゼや X 線造影系に強い負荷がかからないように使用すること
(X 線造影系を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に残存するおそれがある)

【形状・構造等】

- *綿 100%の平織りガーゼの縦糸 1 本を X 線造影系とし織り込んだものを固く球状としたもの
- X 線造影系：硫酸バリウムを含有したポリプロピレン繊維の数十本を収束し、ポリエステルでラセン状にラッピングし糸状としたもの（わかりやすいように有色としてある）

*【使用目的、効能又は効果】

- *出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう X 線で検知できる成分を用いている

*【操作方法又は使用方法】

- 本品を無菌的に滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに、1 回限り使用する

【使用上の注意】

- X 線造影系が切れて体内に残らないように使用すること
- *球状のものを広げて、又は、分解して使用しないこと
- *包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は滅菌品として使用しないこと
- 一度開封したものは、滅菌状態が保てないため、開封後は全量を消費すること
- *ごくまれに電気メス等の使用により引火することがある

【貯蔵方法及び使用期間等】

- 直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること
- *小児の手の届かないところに保管すること
- 使用期限：滅菌袋に記載[自己認証（自社データ）による]

【包装】

- *内容量および単位：パッケージに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

- 製造販売業者 白十字株式会社
〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12
問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910 （休日・夜間 TEL 03-3987-6111）
- 製造業者 白十字株式会社