

**2006 年 9 月 11 日改訂（第 4 版）

*2005 年 8 月 3 日改訂（第 3 版）

届出番号: 13B2X00023000057

医 4 整形用品 32374000 X 線造影材入りガーゼ 一般医療機器

ハクジュウジベルX P

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止 / 体内に留置しないこと

X 線造影系部分をつかまないこと / ガーゼや X 線造影系に強い負荷がかからないように使用すること

（X 線造影系を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に残存するおそれがある）

【形状・構造等】

綿 100%の平織りガーゼの縦糸 1 本以上を X 線造影系とし織り込んだものを固く球状としたもの

X 線造影系：硫酸バリウムを含有したポリプロピレン繊維の数十本を収束し、ポリエステルでラセン状にラッピングし糸状としたもの （わかりやすいように有色としてある）

*【使用目的、効能又は効果】

*出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう X 線で検知できる成分を用いている

*【操作方法又は使用方法】

*衛生材料として適宜滅菌して使用すること

*滅菌方法は、X 線造影系がポリプロピレンなので、エチレンオキシドガス滅菌を推奨 蒸気滅菌の場合には、135 度以下で滅菌すること 電子線滅菌等のその他滅菌方法は、データ不足により不可

【使用上の注意】

X 線造影系が切れて体内に残らないように使用すること

*球状のものを広げて、又は、分解して使用しないこと

*ごくまれに電気メス等の使用により引火することがある

**蒸気滅菌すると、部分的に黄色に変色することがあるが、蒸気による水分が一部分から乾燥するとき起きる現象で、使用上問題は無い

【貯蔵方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

*小児の手の届かないところに保管すること

【包装】

*内容量および単位：パッケージに記載

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

*製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910 （休日・夜間 TEL 03-3987-6111）

*製造業者 白十字株式会社