

*2005年7月19日改訂(第2版)

2003年2月20日作成(新様式第1版)

*届出番号: 13B2X00023000063

医4 整形用品 70975000 医療脱脂綿 一般医療機器

ハクジュウジ脱脂綿滅菌済

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止

体内に留置しないこと

【形状・構造等】

綿100%の脱脂綿(用途に合わせて使用者が適当なサイズに裁断又は、剥がして使用できるもの)

*【使用目的、効能又は効果】

*医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう

*【品目仕様等】

*水の吸収性能は、自重の約20倍を示す

【操作方法又は使用方法】

本品を無菌的に滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに、1回限り使用する

【使用上の注意】

繊維が患部に残らないように注意すること

包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は滅菌品として使用しないこと

一度開封したものは、滅菌状態が保てないので、開封後は全量を消費すること

*綿の表面や内部に黄色又は黒色の斑点状のものがみつかることがあるが綿の実殻であるため使用上に支障はない

【貯蔵方法及び使用期間等】

*直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

小児の手の届かないところに保管すること

使用期限: 滅菌袋に記載[自己認証(自社データ)による]

【包装】

内容量および単位: パッケージに記載

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

問い合わせ(お客様相談室) TEL 0120-01-8910 (休日・夜間 TEL 03-3987-6111)

製造業者 白十字株式会社