

\*\*2015年4月改訂（第3版）（新記載要領に基づく改訂）

\*2005年7月改訂（第2版）

\*届出番号: 13B2X00023000063

一般医療機器 医04 整形用品 70975000 医療脱脂綿

# ハクジュウジ脱脂綿滅菌済

再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止

体内に留置しないこと

## 【形状・構造及び原理等】

綿100%の脱脂綿

## 【使用目的又は効果】

\*\*パッド状の綿繊維から成り、医薬品の塗布や、患者の体表から少量の体液を吸収する等を目的とする

## 【使用方法等】

本品を無菌的に滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに、1回限り使用する

## 【使用上の注意】

繊維が患部に残らないように注意すること

包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は滅菌品として使用しないこと

一度開封したものは、滅菌状態が保てないので、開封後は全量を消費すること

\*綿の表面や内部に黄色又は黒色の斑点状のものがみつかることがあるが綿の実殻であるため使用上に支障はない

## 【保管方法及び有効期間等】

\*直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

小児の手の届かないところに保管すること

\*\*本品の使用期限は包装に記載 [自己認証 (自社データ) による]

## 【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

\*\*<http://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ (お客様相談室) TEL 0120-01-8910 (休日・夜間 TEL 03-3987-6111)