

*2005年7月22日改訂(第2版)

2003年11月10日作成(新様式第1版)

届出番号: 13B2X00023000079

医4 整形用品 34654000 手術用被覆・保護材 一般医療機器

サージカルパット滅菌済

再使用禁止

【禁忌・禁止】


再使用禁止・再滅菌禁止

裁断加工禁止

体内に深く挿入し、埋め込み又は留置をしないこと

【形状・構造等】

*脱脂綿(綿100%)をガーゼ(綿100%)もしくは不織布(セルロース100%)で挟み込み圧着したものの形状は4角形で、向かい合う2辺を接着されたもの

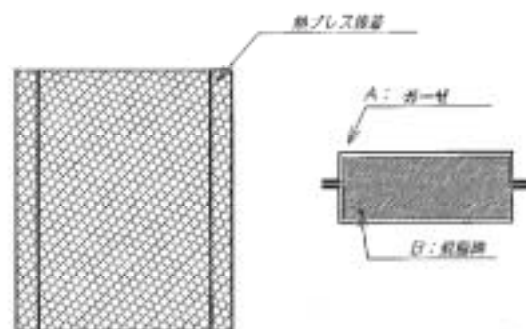

【使用目的、効能又は効果】

術後創傷のために用いる適切なサイズの被覆・保護材をいう

【操作方法又は使用方法】

本品を無菌的に滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに、

1回限り使用する

【使用上の注意】

裁断面から糸がほつれることがあるので、体内に残らないように使用すること

包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は滅菌品として使用しないこと

一度開封したものは、滅菌状態が保てないので、開封後は全量を消費すること

【貯蔵方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

小児の手の届かないところに保管すること

使用期限: 滅菌袋に記載[自己認証(自社データ)による]

【包装】

内容量および単位: パッケージに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

問い合わせ(お客様相談室) TEL 0120-01-8910 (休日・夜間 TEL 03-3987-6111)

製造業者 白十字株式会社