

**2015 年 10 月改訂（第 3 版）（新記載要領に基づく改訂）

*2005 年 7 月改訂（第 2 版）

届出番号: 13B2X00023000079

一般医療機器 医 04 整形用品 34654000 手術用被覆・保護材

サージカルパット滅菌済

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止

裁断加工禁止

体内に深く挿入し、埋め込み又は留置をしないこと

【形状・構造及び原理等】

*脱脂綿（綿 100%）をガーゼ（綿 100%）もしくは
不織布（セルロース 100%）で挟み込み圧着したもの。
形状は 4 角形で、向かい合う 2 辺を接着されたもの。

【使用目的又は効果】

術後創傷のために用いる適切なサイズの被覆・保護材をいう。

【使用方法等】

本品を無菌的に滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに、
1 回限り使用すること。

【使用上の注意】

裁断面から糸がほつれることがあるので、体内に残らないように使用すること。
一度開封したものは、滅菌状態が保てないので、開封後は全量を消費すること。

【保管方法及び有効期間等】

**1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

**2. 有効期間

本品の使用期限は包装に記載〔自己認証（自社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

**<http://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910 （休日・夜間 TEL 03-3987-6111）

