

**2005年8月24日改訂(第3版)

*2005年4月30日改訂(第2版)

**届出番号: 13B2X00023000080

医4 整形用品 32374000 X線造影材入りガーゼ 一般医療機器

白十字XPガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止 / 体内に留置しないこと

X線造影系部分をつかまないこと / *ガーゼやX線造影系に強い負荷がかからないように使用すること

(X線造影系を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に残存するおそれがある)

【形状・構造等】

綿100%の平織りガーゼの縦糸に、X線造影系を1本以上織り込んだもの

X線造影系: 硫酸バリウムを含有したポリプロピレン繊維の数十本を収束し、ポリエステルでラセン状にラッピングし糸状としたもの(わかりやすいように有色としてある)

*【使用目的、効能又は効果】

*出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいうX線で検知できる成分を用いている

*【品目仕様等】

*水の吸収性能は自重の約6倍を示す

*【操作方法又は使用方法】

衛生材料として適宜滅菌して使用すること

*滅菌方法は、X線造影系がポリプロピレンなので、エチレンオキシドガス滅菌を推奨。蒸気滅菌の場合には、135度以下で滅菌すること

電子線滅菌等のその他滅菌方法は、データ不足により不可

【使用上の注意】

*体内に残らないように使用すること

*ごくまれに電気メス等の使用により引火することがある

【貯蔵方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

小児の手の届かない場所に保管すること

【包装】

内容量および単位: パッケージに記載

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

*製造販売業者 白十字株式会社 〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

問い合わせ(お客様相談室) TEL 0120-01-8910 (休日・夜間 TEL 03-3987-6111)

**製造業者 白十字株式会社