

医 4 整形用品 34655000 医療用不織布 一般医療機器

ニューディスポガーゼ滅菌済

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止

体内に留置しないこと

【形状・構造等】

セルロース繊維（Lyocell）を水流により絡め布状にして滅菌したもの

【使用目的、効能又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう

【操作方法又は使用方法】

本品を無菌的に滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに、1 回限り使用する

【使用上の注意】

包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は滅菌品として使用しないこと

一度開封したものは、滅菌状態が保てないので、開封後は全量を消費すること

【貯蔵方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

小児の手の届かないところに保管すること

使用期限：滅菌袋に記載[自己認証データによる]

【包装】

内容量および単位：パッケージに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910 （休日・夜間 TEL 03-3987-6111）

製造業者 白十字株式会社