

医 04 整形用品 34864000 救急絆創膏 一般医療機器

F C 防水ワンタッチパッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止

【形状・構造等】

パッド : 不織布

粘着テープ: ウレタン、アクリル系粘着剤

【使用目的、効能又は効果】

傷の被覆及び保護

【操作方法又は使用方法】

傷口を水道水で汚れや異物を完全に洗浄し、消毒薬で消毒してから水気を良く拭き取って傷口にあて粘着テープで固定してください

【使用上の注意】

キズ口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないよう注意して使用してください

水気があるとつきにくい場合があります

救急絆創膏にかぶれやすい方は使用に際して注意して使用してください

使用中、かゆみ・痛み等のかぶれの症状があらわれた場合には使用を中止して医師又は薬剤師に相談してください

皮膚の弱い方は同じところに繰り返し貼らずに少しずらして使用してください

パッド部分が濡れたり、汚れたりしたままにしておくとう傷の治りがわるくなる場合がありますので貼り替えてください

1 日 1 ～ 2 回貼り替えてください

【貯蔵方法及び使用期間等・洗濯方法】

小児の手の届かない所に保管してください

直射日光を避け、清潔な所に保管してください

滅菌効果が損なわれますので、使用時に開封してください

使用期限：パッケージに記載[自己認証（当社データ）による]

【包装】

単位：枚 / 内容量：6 枚、5 枚、4 枚

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社 〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

問い合わせ（お客様相談室）TEL：0120-01-8910（休日・夜間 TEL 03 - 3987 - 6111）

製造業者 リバテープ製薬株式会社