

**2017 年 3 月改訂（第 3 版）

*2016 年 1 月改訂（第 2 版）（新記載要領に基づく改訂）

届出番号：13B2X00023000117

一般医療機器 医 04 整形用品 34864000 救急絆創膏

F C 防水ワンタッチパッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

*パッド : レーヨン不織布、ポリエチレン

*粘着テープ：ポリウレタン、アクリル系粘着剤

【使用目的又は効果】

傷口の被覆及び保護。

【使用方法等】

*① 傷口やそのまわりを水道水等で汚れや異物を取り除き、水気をよく拭き取ってください。

*② はくり紙をパッドが見えるまで両手で広げます。（パッド部分、シール部分に手が触れないように注意してください。）

*③ パッド部分を傷口に当て、はくり紙を剥がしながら貼ってください。

【使用上の注意】

傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないよう注意して使用してください。

水気があるとつきにくい場合があります。

*粘着面を患部に貼らないでください。

救急絆創膏にかぶれやすい方は使用に際して注意してください。

皮膚の弱い方は同じところに繰り返し貼らずに少しずつらして使用してください。

*引っ張りながら貼ると皮膚にストレスが掛かってしまうため、できるだけ伸ばさずに貼ってください。

使用中、かゆみ・痛み等のかぶれの症状があらわれた場合には使用を中止して医師又は薬剤師に相談してください。

**本品は、防水を目的とした粘着力設計になっておりますので、防水用途以外での長時間使用は皮膚トラブルの原因になる場合がございます。防水用途でのご使用後は、すみやかに剥がしてください。

**皮膚へ粘着剤が残った場合は、蒸しタオル等でやさしく拭き取ってください。

*小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとにご使用ください。

【保管方法及び有効期間等】

*1. 保管方法

小児の手の届かない所に保管してください。

直射日光を避け、清潔な所に保管してください。

滅菌効果が損なわれますので、使用時に開封してください。

*2. 有効期間

*本品の使用期限は包装に記載〔自己認証(自社データ)による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

*<http://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室）TEL：0120-01-8910（休日・夜間 TEL 03 - 3987 - 6111）