

*2008 年 1 月 7 日作成（第 2 版）

2005 年 7 月 25 日作成（新様式第 1 版）

届出番号：13B2X00023000119

医 04 整形用品 34655000 医療用不織布 一般医療機器

F C 滅菌パッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止

【形状・構造等】

パッド：レーヨン不織布、ポリエチレン、ポリエステル

【使用目的、効能又は効果】

傷口の被覆及び保護

【操作方法又は使用方法】

- * 1 . 傷口を水道水で汚れや異物を完全に洗浄し、消毒薬で消毒してから水気を良く拭き取ってください。
- * 2 . 清潔な手で袋からパッドを取り出しそのまま傷口に当ててください。パッドはどちらの面でもご使用頂けます。
- * 3 . パッドの上からテープや包帯（別売）で固定してください。

【使用上の注意】

- *包装が開封、破損及び汚損している場合は滅菌品として使用しないでください。
- *傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく拭き取って、表面を汚さないよう注意して使用ください。水気があるとつきにくい場合があります。
- 使用中、かゆみ・痛み等のかぶれの症状があらわれた場合には使用を中止して医師又は薬剤師に相談してください。
- *分泌液が多い場合には、こまめに貼りかえるようにしてください。
- *パッド部分が濡れたり、汚れたりしたままにしておくと傷の治りがわるくなる場合があります。

*【貯蔵方法及び使用期間等】

小児の手の届かない所に保管してください
直射日光を避け、清潔な所に保管してください
滅菌効果が損なわれますので、使用時に開封してください
使用期限：パッケージに記載[自己認証（当社データ）による]

*【包装】

サイズ / 1 袋入数	中箱入数	梱入数
M サイズ / 8 枚	1 0 袋	1 0 箱（1 0 0 袋）
L サイズ / 5 枚	1 0 袋	1 0 箱（1 0 0 袋）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171 -8552 東京都豊島区高田 3 -23 -12

問い合わせ（お客様相談室）TEL：0120 -01 -8910（休日・夜間 TEL 03 - 3987 - 6111）

製造業者 リバテープ製薬株式会社