

医 4 整形用品 11028000 コットンボール 一般医療機器

白十字 X P 綿球滅菌済

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止 / 体内に留置しないこと
X 線造影系部分をつかまないこと / X 線造影系に強い負荷がかからないように使用すること
(X 線造影系を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に残存するおそれがある)

【形状・構造等】

脱脂綿（綿 100%）に X 線造影系を含み球状に丸めたもの
X 線造影系：硫酸バリウムを含有したポリプロピレン繊維の数十本を収束し、ポリエステルでラセン状にラッピングし糸状としたもの（わかりやすいように有色としてある）

【使用目的、効能又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう

【品目仕様等】

水の吸収性能は自重の約 10 倍を示す

【操作方法又は使用方法】

本品を無菌的に滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに、1 回限り使用すること

【使用上の注意】

繊維が患部に残らないように注意すること
X 線造影系が切れて体内に残らないように使用すること
X 線造影系が脱落する恐れがあるため、球状のものを広げて、又は、分解して使用しないこと
ごくまれに電気メス等の使用により引火することがある
包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は滅菌品として使用しないこと
一度開封したものは、滅菌状態が保てないので、開封後は全量を消費すること
綿の表面や内部に黄色又は黒色の斑点状のものがみつかることがあるが綿の実殻であるため使用上に支障はない

【貯蔵方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること
小児の手の届かないところに保管すること
使用期限：滅菌袋に記載〔自己認証(自社データ)による〕

【包装】

内容量および単位：パッケージに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社 〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12
問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）
製造業者 オオサキメディカル株式会社