

医4 整形用品 70975000 医療脱脂綿 一般医療機器

トップバリュカット綿

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

体内に留置しないこと

【形状・構造等】

綿100%の脱脂綿

【使用目的、効能又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収する等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう

【品目仕様等】

水の吸収性能は、自重の約20倍を示す

【操作方法又は使用方法】

ご使用の際は手指を清潔にし、適度な大きさにカットすること

直接患部に使用する時は、傷口を消毒薬等で殺菌してから使用すること

【使用上の注意】

綿の表面や内部に黄色又は黒色の斑点状のものがみつかることがあるが綿の実殻であるため使用上に支障はない

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光の当たるところを避けて保管すること

直接患部に使用するときは、繊維が患部に残らないように注意すること

開封後は早めに使用し、清潔なところに保管すること

【貯蔵方法及び使用期間等】

水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

小児の手の届かないところに保存すること

【包装】

単位：グラム（g） / 内容量：50g、100g

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）

製造業者

白十字株式会社