

医 4 整形用品 34655000 医療用不織布 一般医療機器

ソフキュアガーゼ滅菌済

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止

体内に留置しないこと

【形状・構造等】

脱脂綿（綿 100%）を水流により絡め布状にしたもの。

【使用目的、効能又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう

【操作方法又は使用方法】

本品を無菌的に滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに、1 回限り使用する

【使用上の注意】

包装が開封、破損及び汚損している場合は滅菌品として使用しないこと

一度開封したものは、滅菌状態が保てないので、開封後は全量を消費すること

【貯蔵方法及び使用期間等】

水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

小児の手の届かないところに保管すること

使用期限：滅菌袋及び外箱に記載[自己認証（当社データ）による]

【包装】

内容量および単位：パッケージに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171 -8552 東京都豊島区高田 3 -23 -12

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120 -01 -8910 （休日・夜間 TEL 03 -3987 -6111）

製造業者 白十字株式会社