

医 4 整形用品 13705000 X線造影材入りスポンジ 一般医療機器

オペスポンジX 滅菌済

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止 / 体内に留置しないこと
分割や裁断等の加工を行っての使用禁止
乾燥状態のまま体内に適用しないこと

【形状・構造等】

セルローススポンジを綿100%の平織りガーゼ数枚を重ね、綿100%の糸で縫製したもので包んだもの。ガーゼには体内残留防止のため、X線造影用の糸を1本以上含有している。また、一角には体内残留を防ぐ目的で綿テープを取りつけてある。

製品サイズ（湿潤状態：高さ×幅×奥行） S:80×95×70mm、M:80×190×70mm、L:80×280×70mm

X線造影糸：硫酸バリウムを含有したポリプロピレン繊維の数十本を収束し、ポリエステルでラセン状にラッピングし糸状としたもの（わかりやすいように有色としてある）

【使用目的、効能又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

【操作方法又は使用方法】

本品を無菌的に滅菌袋より取り出し、清潔区域下で滅菌済生理食塩水を適量（S：300g、M：550g、L：800g）かけて膨潤させる。その後、必要に応じてしぼり、開腹術等において、術野の確保のため、臓器の圧排に使用する。本品は1回限り使用する。

【使用上の注意】

乾燥状態では硬いため、滅菌済生理食塩水で湿潤状態として使用すること

体内に残らないように使用すること

包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は滅菌品として使用しないこと

一度開封したものは、滅菌状態が保てないため、開封後は全量を消費すること

ごくまれに電気メス等の使用により引火することがある

【貯蔵方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

小児の手の届かないところに保管すること

使用期限：滅菌袋に記載 [自己認証（自社データ）による]

【包装】

1箱5袋入り、1袋1個入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910 （休日・夜間 TEL 03-3987-6111）

製造業者 白十字株式会社