

医4 整形用品 34654000 手術用被覆・保護材 一般医療機器

11322101 熱傷被覆・保護材 一般医療機器

モイスキンパッド 滅菌済

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止

裁断加工禁止

体内に深く挿入し、埋め込み又は留置をしないこと

【形状・構造等】

表面材: ポリエチレンテレフタレート又はポリエチレン

吸収材: レーヨン・紙・高吸水性樹脂

防水材: ポリエチレン・ポリプロピレン

これらを結合剤または熱圧着でシート状に一体化したもの

【使用目的、効能又は効果】

術後創傷のために用いる適切なサイズの被覆・保護材をいう。また、熱傷皮膚を被覆及び保護し、熱傷部位の滲出液を吸収するために用いる幅広の層状ガーゼパッドをいう。

【品目仕様等】

生理食塩水の吸収性能は、自重の5倍以上を示す。吸収面は滲出液を徐々に吸収するための小孔を備えている。

【操作方法又は使用方法】

- (1) 創の大きさよりやや大きいサイズの本品を選び、無菌的に滅菌袋より取り出し、本品の吸収面（有孔フィルム面）を創部に当てる。
- (2) 医療用テープ等の材料を用いて、本品が創部からずれないように固定する。
- (3) 必要に応じて白色ワセリン等を吸収面（有孔フィルム面）に塗布して使用する。（軟膏剤の添付文書をご確認してから使用してください）

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品使用中に皮膚障害や創感染と思われる症状があらわれた場合には、使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- (2) 本品使用中は創の観察を十分に行い、滲出液の量や創の状態に応じ適切な交換及び処置を行うこと。
- (3) 創に余分な圧力がかからない様、除圧の処置を適宜行う。

2. 不具合・有害事象

本品使用中は下記の症状を生じる恐れがある。

- ・ 創の感染症状
- ・ 創傷及び周囲の皮膚障害（表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、発赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎）
- ・ 固着

- ・ 壊死組織の増加

- ・ 疼痛

3. その他の注意

- (1) 格子印刷（防水材）側を創部に当てて使用しないこと（吸収しないため）。
- (2) 包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染が見られる場合は滅菌品として使用しないこと。一度開封したものは滅菌状態が保てないので、開封後は全量を消費すること。

【貯蔵方法及び使用期間等】

- (1) 直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (3) 使用期限：滅菌袋に記載〔自己認証（自社データ）による〕

【包装】

製品サイズ、滅菌包装サイズ、滅菌包装の製品入り数および箱入り数は以下の通り。

品目	吸収体サイズ	包装入数	箱入数
モイスキンパッド 7510	75 × 100mm	1 枚	60 包
モイスキンパッド 7520	75 × 200mm	1 枚	30 包
モイスキンパッド 1515	150 × 150mm	1 枚	30 包
モイスキンパッド 1530	150 × 300mm	1 枚	30 包
モイスキンパッド 2630	260 × 300mm	1 枚	15 包

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

問い合わせ（お客様相談室）TEL 0120-01-8910

（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）

製造業者 白十字株式会社