

一般医療機器 医 04 整形用品 34654000 手術用被覆・保護材

一般医療機器 医 04 整形用品 11322101 熱傷被覆・保護材

モイスキンパッドスルー 滅菌済

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止

裁断加工禁止

体内に深く挿入し、埋め込み又は留置をしないこと

【形状・構造及び原理等】

・表面材:ポリエチレンテレフタレート

*吸収材:レーヨン又はレーヨンとポリエチレンテレフタレートの複合材・紙・高吸水性樹脂

・裏面材:コットン不織布

これらを結合剤または熱圧着でシート状に一体化したもの

【使用目的又は効果】

*術後創傷の被覆・保護又は熱傷部位の被覆・保護・滲出液の吸収を目的とした幅広の層状ガーゼパッド。裏面材がコットン不織布のため、滲出液の量に応じて他の吸収性物品を上から重ねて使用することが可能である。

【使用方法等】

- (1) 創の大きさよりやや大きいサイズの本品を選び、無菌的に滅菌袋より取り出し、本品の吸収面(有孔フィルム面)を創部に当てること。
- (2) 医療用テープ等の材料を用いて、本品が創部からずれないように固定する。もしくは、本品の上から衛生材料を用いて被覆固定すること。
- (3) 本品は少なくとも1日1回交換すること。
- (4) 必要に応じて白色ワセリン等を吸収面(有孔フィルム面)に塗布して使用すること。(軟膏剤の添付文書をご確認してから使用してください)

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品使用中に皮膚障害や創感染と思われる症状があらわれた場合には、使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- (2) 本品使用中は創の観察を十分に行い、滲出液の量や創の状態に応じ適切な交換及び処置を行うこと。
- (3) 創に余分な圧力がかからない様、除圧の処置を適宜行うこと。

2. 不具合・有害事象

本品使用中は下記の症状を生じる恐れがある。

- ・ 創の感染症状
- ・ 創傷及び周囲の皮膚障害(表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、発赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎)
- ・ 固着
- ・ 壊死組織の増加
- ・ 疼痛

3. その他の注意

- (1) 不織布(裏面材)側を創部に当てて使用しないこと(浸出液が少ない場合、創部に固着する可能性があるため)。
- (2) 包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染が見られる場合は滅菌品として使用しないこと。一度開封したものは滅菌状態が保てないので、開封後は全量を消費すること。
- (3) 本品は、小売での開封小分け販売はできない。

【保管方法及び有効期間等】

*1. 保管方法

- (1) 直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること。

*2. 有効期間

本品の使用期限は包装に記載[自己認証(自社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

*<http://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ(お客様相談室) TEL 0120-01-8910

(休日・夜間 TEL 03-3987-6111)