

医 4 整形用品 13705000 X 線造影材入りスポンジ 一般医療機器

白十字オペゼ X

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止・滅菌は一度限りとする事 ／ 体内に留置しないこと
X 線造影系部分をつかまないこと ／ ガーゼや X 線造影系に強い負荷がかからないように使用すること
(X 線造影系を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に残存するおそれがある)

【形状・構造等】

綿 100%の平織りガーゼ数枚を重ね、綿 100%の糸で縫製したもの。
通常は 4 角形で、その 1 角に体内残留を防ぐ目的で綿テープを取りつけてあるものもある。
体内残留防止のため X 線造影用の糸を 1 本以上含有している。
X 線造影糸：スチレン系樹脂に硫酸バリウムを配合し、糸状にしたもの。(わかりやすいように有色としてある)

【品目仕様等】

水の吸収性能は自重の約 7 倍を示す。

【使用目的、効能又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする X 線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

【操作方法又は使用方法】

衛生材料として適宜滅菌して使用すること。
滅菌方法は X 線造影糸がスチレン系樹脂のため、エチレンオキシドガス滅菌を推奨。蒸気滅菌の場合には、121 度以下で滅菌すること。電子線滅菌等のその他滅菌方法は、データ不足により不可。
患者の体内への遺残を防止するため、手術前に使用する本品の数を確認し、手術終了時の縫合前にも必ず再度本品の数を確認すること。
縫合前にはレントゲン写真の撮影を行い、術野の造影糸像を確かめガーゼの遺残がないことを確認すること。

【使用上の注意】

体内に残らないように使用すること。
造影糸の強度が低下するため、滅菌は一度限りとし再滅菌は行わないこと。
ごくまれに電気メス等の使用により引火することがある。

【貯蔵方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
小児の手の届かないところに保管すること。

【包装】

内容量および単位：パッケージに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社
〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12
問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910 （休日・夜間 TEL 03-3987-6111）
製造業者 白十字株式会社