

医 04 整形用品 34655000 医療用不織布 一般医療機器

11322101 熱傷被覆・保護材 一般医療機器

モイスキンシート

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

体内に深く挿入し、埋め込み又は留置をしないこと

【形状・構造等】

・表面材: ポリウレタン

・吸収材: レーヨン/ポリエチレンテレフタレート

これらをシート状に一体化したもの

【使用目的、効能又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。また、熱傷皮膚を被覆及び保護し、熱傷部位の滲出液を吸収するために用いる幅広の層状ガーゼパッドをいう。他の吸収性物品を上から重ねて使用することで、本品の吸収を補うことが可能である。

【品目仕様等】

生理食塩液の吸収性能は、自重の5倍以上を示す。表面は滲出液を徐々に吸収するための小孔を備えている。

【操作方法又は使用方法】

- (1) 本品を箱から引き出し、はさみ等を用いて任意の大きさに切り取り、エチレンオキサイドガス滅菌を施すこと。
- (2) 本品の表面材(有孔フィルム面)側を創部に当てること。
- (3) 医療用テープ等の材料を用いて、本品が創部からずれないように固定する。もしくは、本品の上から衛生材料を用いて被覆固定すること。
- (4) 本品は少なくとも1日1回交換すること。
- (5) 必要に応じて白色ワセリン等を表面材(有孔フィルム面)に塗布して使用することが可能である。(使用前に軟膏剤の添付文書を確認すること)
- (6) 本品を交換する際はゆっくり慎重に剥がすこと。また、本品が創傷面に固着している場合は、生理食塩水等で固着した部分を湿らせ、新生組織の損傷に注意をしながら剥がすこと。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品使用中に皮膚障害や創感染と思われる症状があらわれた場

合には、使用を中止し、適切な処置を行うこと。

- (2) 本品使用中は創の観察を十分に行い、滲出液の量や創の状態に応じ適切な交換及び処置を行うこと。
- (3) 創に余分な圧力がかからないよう、除圧の処置を適宜行うこと。

2. 不具合・有害事象

本品使用中は下記の症状を生じる恐れがある。

- ・ 創の感染症状
- ・ 創傷及び周囲の皮膚障害(表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、発赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎)
- ・ 固着
- ・ 壊死組織の増加
- ・ 疼痛

3. その他の注意

- (1) 吸収材(青色ドット印刷面)側を創部に当てて使用しないこと(滲出液が少ない場合、創部に固着する可能性があるため)。
- (2) 包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染が見られる場合は使用しないこと。
- (3) 本品は、小売での開封小分け販売はできない。
- (4) 体動により創部からシートがずれてしまうことを避けるため、本品は創部よりもひと回り大きめのサイズに裁断し使用すること。

【貯蔵方法及び使用期間等】

- (1) 直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (3) 使用期限: 箱に記載 [自己認証(自社データ)による]

【包装】

単位: 箱 / 内容量・サイズ: 箱に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

問い合わせ (お客様相談室) TEL 0120-01-8910

(休日・夜間 TEL 03-3987-6111)

製造業者 白十字株式会社