

医4 整形用品 70975000 医療脱脂綿 一般医療機器

# 白十字綿

再使用禁止

## 【使用上の注意】

### 【禁忌・禁止】 してはいけないこと

再使用禁止：一度使ったものは、使用しないでください。

傷等に埋め込んで使用することは、おやめください。

## 【形状・構造等】

綿100%の脱脂綿です。

## 【使用目的、効能または効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用する脱脂綿です。

## 【品目仕様等】

水の吸収性能は、自重の約20倍です。

## 【使用方法】

使用用途に応じて適切なサイズに裁断、剥がし、又は巻きつけて使用してください。

## 【保管及び取扱い上の注意】

繊維が患部に残らないように使用してください。

包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は使用しないでください。

開封後は早めに使用してください。

ご使用后、トイレに流さないで衛生的に処理してください。

綿の表面や内部に黄色又は黒色の斑点状のものがみつかることがあるが、綿の実殻であるため使用上に支障はございません。

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。

小児の手の届かないところに保管してください。

## 【包装】

内容量および単位：パッケージに記載

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）

製造業者 白十字株式会社