

医 04 整形用品 34864000 救急絆創膏 一般医療機器

## H J ワンタッチパッド

## 再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止

## 【形状・構造等】

パッド : 不織布、ポリエチレンネット

粘着テープ : ポリエステル、アクリル系粘着剤

## 【使用目的、効能又は効果】

傷口の被覆及び保護

## 【操作方法又は使用方法】

傷口を水道水で汚れや異物を完全に洗浄し、消毒薬で消毒してから水気を良く拭き取って傷口にあて粘着テープで固定してください。

## 【使用上の注意】

傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないよう注意してください。

水気があるとつきにくい場合があります。

粘着面を患部に貼らないでください。

救急絆創膏にかぶれやすい方は使用に際して注意して使用してください。

使用中、かゆみ・痛み等のかぶれの症状があらわれた場合には、使用を中止して医師又は薬剤師に相談してください。

皮膚刺激の発生要因になりますので、長時間貼り付けたり、急激に剥がしたりしないでください。

皮膚の弱い方は、同じところに繰り返し貼らずに、少しずつ使用してください。

パッド部分が濡れたり、汚れたりしたままにしておくと、傷の治りがわるくなる場合がありますので、貼りかえてください。

1日1～2回貼りかえてください。

小児に使用する場合には、保護者の指導監督のもとに、ご使用ください。

## 【貯蔵方法及び使用期限等】

小児の手の届かない所に保管してください。

直射日光を避け、清潔な場所に保管してください。

滅菌効果が損なわれますので、使用時に開封してください。

使用期限：パッケージに記載 [自己認証（当社データ）による]

## 【包装】

種類	規格	枚数
Sサイズ	30mm×72mm (パッド20mm×30mm)	12枚
Mサイズ	50mm×80mm (パッド30mm×40mm)	6枚
Lサイズ	60mm×100mm (パッド40mm×60mm)	4枚

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

問い合わせ（お客様相談室）TEL：0120-01-8910（休日・夜間 TEL：03-3987-6111）

製造業者 リバテープ製薬株式会社