

2022 年 7 月 (第 1 版)

届出番号: 13B2X00023000190

一般医療機器 器 54 医療用捲綿子 10172000 医科用捲綿子

白十字婦人科用綿棒 滅菌済


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は木軸、脱脂綿(綿 100%)、糊剤(ポリビニルアルコール)からなる綿棒である。

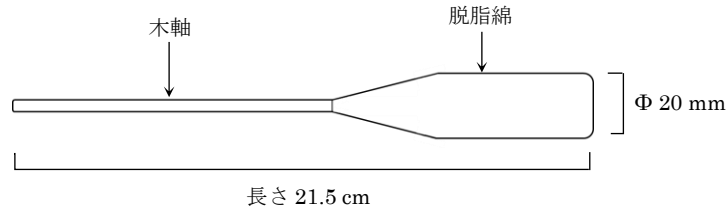

【使用目的又は効果】

身体の一部及び体内に薬剤を塗布すること、治療することを目的とする。

【使用方法等】

- 1) 本品を無菌的に滅菌袋から取り出す。
- 2) 薬剤を塗布する場合、脱脂綿に薬剤を含ませて使用すること。
- 3) 一度開封したものは滅菌状態が保てないため、開封後は全量を消費すること。

【使用上の注意】

- 1) 直接患部に使用するときは、繊維が患部に残らないように注意すること。[繊維が脱落することがあるため]
- 2) 体内に留置しないこと。[使い捨て医療機器のため]
- 3) 包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は滅菌品として使用しないこと。[保健衛生上の危害が生じる可能性があるため]
- 4) 再滅菌しないこと。[品質及び安全性を保証できないため]
- 5) 開封後は速やかに使用すること。[保健衛生上の危害が生じる可能性があるため]
- 6) 本品を加工しないこと。[品質及び安全性を保証できないため]
- 7) 軸に力を入れ過ぎたり、強く押ししたりしないこと。[軸が折れる原因となるため]
- 8) 脱脂綿の表面や内部に黄色又は黒色の斑点状のものがみつかることがあるが、綿の実殻であるため使用上に支障はない。
- 9) 木軸のささくれで肌を傷つける恐れがあるため、注意して使用すること。
- 10) 本品は小売りでの開封小分け販売はできない。[保健衛生上の危害が生じる可能性があるため]

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
2. 有効期間
本品の使用期限は包装に記載。[自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

<https://www.hakujuji.co.jp>

問い合わせ(お客様相談室)

TEL 0120-01-8910 (休日・夜間 TEL 03-3987-6111)