

## 一般医療機器 医 04 整形用品 34654000 手術用被覆・保護材

## モイスキンパッド

## 再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

## 1.使用方法

再使用禁止

裁断加工禁止

## 【形状・構造及び原理等】

表面材:ポリエチレンテレフタレート又はポリエチレン

吸収材:レーヨン又はレーヨンとポリエチレンテレフタレートの

複合材・紙・高吸水性樹脂

防水材:ポリエチレン・ポリプロピレン

これらを結合剤または熱圧着でシート状に一体化したものを。

## 【使用目的又は効果】

術後創傷の被覆・保護を目的とした幅広の層状ガーゼパッド。

## 【使用方法等】

## 1.使用方法

- (1) 創の大きさよりやや大きいサイズの本品を選び、本品の吸収面(有孔フィルム面)を創部に当ててください。
- (2) 医療用テープ等の材料を用いて、本品が創部からずれないように固定してください。
- (3) 必要に応じて白色ワセリン等を吸収面(有孔フィルム面)に塗布して使用してください。(軟膏剤の添付文書をご確認してから使用してください)
- (4) 本品は未滅菌のため、傷口等、滅菌を必要とする場合は必ず滅菌を行ってからご使用ください。  
(滅菌方法はエチレンオキサイド滅菌とし1回限りとしてください。)

## 2.使用方法等に関連する使用上の注意

・格子印刷(防水材)側を創部に当てて使用しないでください。

[吸収しないため]

・開封したまま放置しないでください。

水濡れ・破損・汚染が見られる場合は使用しないでください。

[品質及び安全性を保証できないため]

・本品使用中は創の観察を十分に行い、滲出液の量や創の状態に応じ適切な交換及び処置を行ってください。また、長時間の使用を避け、1日1回程度貼る場所を少しずつらして貼り替えてください。

[肌のかぶれ・損傷を防ぐため]

- ・創に余分な圧力がかからない様、除圧を適宜行ってください。  
[肌のかぶれ・損傷を防ぐため]
- ・本品を交換する際はゆっくり慎重に剥がすこと。また、本品が創傷面に固着している場合は、生理食塩水等で固着した部分を湿らせ、新生組織の損傷に注意をしながら剥がしてください。
- ・本品使用中に皮膚障害や創感染と思われる症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

## 【使用上の注意】

## 1. 重要な基本的注意

- ・本品は、小売での小分け販売はできません。  
[保健衛生上の危害が生じる可能性があるため]
- ・体内に深く挿入し、埋め込み又は留置させないでください。  
[使い捨て医療機器のため]

## 2. 不具合・有害事象

本品使用中は下記の症状を生じる恐れがあります。

- ・ 創の感染症状
- ・ 創傷及び周囲の皮膚障害(表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、発赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎)
- ・ 固着、壊死組織の増加、疼痛

## 【保管方法及び有効期間等】

## 1. 保管方法

- ・直射日光及び火気を避け、  
湿気の少ない清潔な場所に保管してください。
- ・開封後は小分けせずに容器に入れたまま保管してください。

## 2. 有効期間

本品の使用期限は包装に記載

[自己認証(自社データ)によります]

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

<https://www.hakujuji.co.jp>

問い合わせ (お客様相談室) TEL 0120-01-8910

(休日・夜間 TEL 03-3987-6111)