

\*2005年7月19日改定(第2版)

2005年4月30日作成(新様式第1版)

\*届出番号: 13B2X00023A00105

器 12 理学診療用器具 70617000 止血用押圧器具 一般医療機器

## ハクジウアンギオ滅菌済

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止

体内に留置しないこと

### 【形状・構造等】

適度の柔らかさと若干の保水作用がある楕円筒形製品

### 【使用目的、効能又は効果】

血管造影、その他の診断処置終了時に、大腿部又は前腕(橈骨動脈)部のカテーテル挿入部位を圧迫止血するために用いる器具をいう

### 【操作方法又は使用方法】

製品を無菌的に取り出し、止血部分に圧迫止血できる程度に抑えて、テープや包帯で固定する

### 【使用上の注意】

直接患部に使用するとき、繊維が患部に残らないように注意すること

\*包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は滅菌品として使用しないこと

一度開封したものは、滅菌状態が保てないので、開封後は全量を消費すること

### 【貯蔵方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

\*小児の手の届かないところに保管すること

使用期間: 滅菌袋に記載 [ 自己認証データによる ]

### 【包装】

単位: 個 / 入り数: パッケージに記載

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

問い合わせ(お客様相談室) TEL 0120-01-8910 (休日・夜間 TEL 03-3987-6111)

製造業者 白十字株式会社

尾崎工業株式会社