

33961001 単回使用クラス 処置キット 一般医療機器

白十字ケアセット 未滅菌

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【形状・構造等】

- 1．本品は以下の構成品のうち、2 つ以上の製品を組み合わせた医療機器である
- 1 ) 13700000：医療ガーゼ（ハクジュウジ大学ガーゼ・白十字折りガーゼ・Y ガーゼ（未滅菌）・ベルガーゼ）
  - 2 ) 32374000：X 線造影材入りガーゼ（白十字XP ガーゼ・ハクジュウジベル XP・ハクジュウジコメ XP）
  - 3 ) 13705000：X 線造影材入りスポンジ（ハクジュウジオペーゼ XP）
  - 4 ) 11028000：コットンボール（シルキー綿球・白十字綿球・白十字 XP 綿球・ノイロボール）
  - 5 ) 34655000：医療用不織布（シングルガーゼ・シングルドレーンスワブ・ソフキュアガーゼ）
  - 6 ) 15085000：開腹術用スポンジ（ハクジュウジオペーゼ）
  - 7 ) 34654000：手術用被覆・保護材（シングルパッド A・ハクジュウジサージカルパット）
  - 8 ) 32572000：綿状パッド（ノイロシート（未滅菌））
  - 9 ) 雑品：伸縮包帯・綿棒・検診台シート・ピンセット（非手術器具）
- 2．組み合わせによって同封されない製品がある
- 3．同封されている構成品及び数量は、直接の容器にラベルで表示されている

【使用目的、効能又は効果】

一般的な処置を行うために必要なクラス の各種器具、被覆保護材及び医薬品の全てを含むプレパッケージされたキットをいう

本品は単回使用である

【操作方法又は使用方法】

本品を滅菌し、無菌的に滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに、1 回限り使用する。滅菌方法は、EO ガス滅菌及び蒸気滅菌 135 度以下を推奨。

【使用上の注意】

本品は、滅菌して使用すること

包装が破損又は汚損、水濡れしている場合は、使用しないこと

X 線造影糸は切れやすいので、引っ張る、しごく、つまむ等の力学的負荷をかけないこと

【貯蔵方法及び使用期間等】

貯蔵方法：直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

小児の手の届かないところに保管すること

【包装】

単位：セット / 内容量：パッケージに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者    白十字株式会社

〒171 -8552 東京都豊島区高田 3 -23 -12

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120 -01 -8910

（休日・夜間 TEL 03 -3987 -6111）

製造業者        白十字株式会社