

33961001 単回使用クラス 処置キット 一般医療機器

白十字ケアセット 未滅菌

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

体内に留置しないこと

【形状・構造等】

1. 本品は以下の構成品のうち、2 つ以上の製品を組み合わせた医療機器である

1) 13700000: 医療ガーゼ (ハクジュウジ大学ガーゼ・白十字折りガーゼ・Y ガーゼ (未滅菌)・ベルガーゼ)

2) 32374000: X 線造影材入りガーゼ (白十字 X P ガーゼ・ハクジュウジベル XP・ハクジュウジコメ XP)

3) 13705000: X 線造影材入りスポンジ (ハクジュウジオパーゼ XP)

4) 11028000: コットンボール (シルキー綿球・白十字綿球・白十字 XP 綿球・ノイロボール)

5) 34655000: 医療用不織布 (シングルガーゼ・シングルドレーンスワブ・ソフキュアガーゼ)

6) 15085000: 開腹術用スポンジ (ハクジュウジオパーゼ)

7) 34654000: 手術用被覆・保護材 (シングルパッド A・ハクジュウジサージカルパット)

8) 32572000: 綿状パッド (ノイロシート (未滅菌))

* 9) 70975000: 医療脱脂綿 (ハクジュウジ脱脂綿)

10) 雑品: 伸縮包帯・綿棒・検診台シート・ピンセット (非手術器具)・*デンタル綿

2. 組み合わせによって同封されない製品がある

3. 同封されている構成品及び数量は、直接の容器にラベルで表示されている

【使用目的、効能又は効果】

一般的な処置を行うために必要なクラス の各種器具、被覆保護材及び医薬品の全てを含むプレパッケージされたキットをいう

本品は単回使用である

【操作方法又は使用方法】

本品を滅菌し、無菌的に滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに、1 回限り使用する。滅菌方法は、E O ガス滅菌及び蒸気滅菌 135 度以下を推奨。

【使用上の注意】

本品は、滅菌して使用すること

包装が破損又は汚損、水濡れしている場合は、使用しないこと

X 線造影糸は切れやすいので、引っ張る、しごく、つまむ等の力学的負荷をかけないこと

【貯蔵方法及び使用期間等】

貯蔵方法: 直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

小児の手の届かないところに保管すること

【包装】

単位: セット / 内容量: パッケージに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 ☼ 白十字株式会社

〒171 -8552 東京都豊島区高田 3 -23 -12

問い合わせ (お客様相談室) TEL 0120 -01 -8910

(休日・夜間 TEL 03 -3987 -6111)

製造業者 ☼ 白十字株式会社