

機械器具 15 舌圧子

一般医療機器 一般的名称：舌圧子 JMDN コード：14066000

マイスコ ディスポーザブル舌圧子

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 口腔、咽喉の検診以外に使用しないこと。
- ・ 再使用をしないこと。
- ・ 再滅菌をしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

松吉医科器械株式会社

住所：〒113-8520 東京都文京区湯島 3-14-9

電話：03-5816-8819

製造業者


DALIAN GOODWOOD MEDICAL CARE LTD.（中華人民共和国）

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、天然木の白樺から板状に製作され、舌を固定及び移動させて口腔内の組織を検査するために用いるものである。

2. 形状

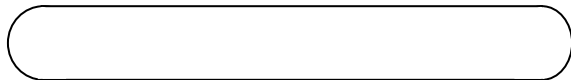

長さ	幅	厚さ
150mm	16mm	1.6mm

【使用目的又は効果】

本製品は、舌を固定又は移動させて、口腔内の組織を検査するために用いる手術器具である。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出して患者の口腔内に挿入する。
2. 本品は、舌を押さえるために使用し、咽喉部を観察する。

【使用上の注意】

1. 本品はEOGガス滅菌済製品であり、単一の患者に一回限り使用し、再使用しないこと。
2. 使用前に、本品の汚れ・破損（欠け、割れ、ささくれ等）・変形等を点検すること。
3. 破損する可能性があるため、過度な力で押さえないこと。
4. 体内へ留置しないこと。
5. 開封後は、速やかに使用すること。

【保管方法及び使用期間等】

1. 保管方法

- (1) 直射日光に当てず高温多湿を避け、水漏れに注意して常温・常湿の室内に保管すること。また、衛生的な保管場所に保管すること。

2. 使用期限

- (1) 滅菌有効期限は、滅菌日より3年間。（有効期限は外箱に記載）